



Recolección de ADN sencilla y fiable con ORAcollect•DNA

- **Recolección de ADN rápida y fiable a partir de muestras orales**
- **El ADN es estable y puede transportarse de forma segura por correo postal**
- **Ideal para la recolección autónoma o asistida en casa o en los puntos de asistencia**
- **El formato estandarizado de los tubos para las muestras líquidas es compatible con la extracción automatizada de ADN**
- **Las muestras de ADN de calidad superior se pueden usar en una amplia gama de aplicaciones posteriores**
- **Con código de barras para la trazabilidad total de la muestra**



**Muestra lista para
transportar, almacenar
y procesar**

Sistema de recolección n.º de catálogo:
OCR-100

**Para más información contacte
con info@dnagenotek.com**

Otros productos de DNA Genotek



Ventajas

ORACollect-DNA es una alternativa fiable a los hisopos bucales y ofrece varias ventajas:

- Protocolo de recolección rápido que no necesita tiempo de secado
- Muestra de alta calidad; el reactivo ORACollect-DNA es bacteriostático e inhibe el crecimiento de bacterias desde el momento de la recolección de la muestra hasta su procesamiento
- La muestra líquida permite:
 - el uso de robots manipuladores de líquidos
 - la compatibilidad con equipos estándar de laboratorio
 - un procesamiento sencillo
 - no es necesario seccionar los extremos
 - el menor número de pasos manuales reduce la posibilidad de errores y contaminación cruzada

Comparación de métodos de recolección

	Extracción sanguínea	Recolección oral	
Características	Sangre venosa	Hisopos bucales	OCR-100
Recolección no invasiva	✗	✓	✓
Formato estandarizado para procesamiento de alto rendimiento	✓	✗	✓
Muestra líquida	✓	✗	✓
Estabilidad de la muestra a temperatura ambiente	Días	Días	Meses
No requiere cadena de frío	✗	✓	✓
Bacteriostático	✗	✗ [†]	✓ [†]
Obtención media de ADN	30 µg	0,7 µg [†]	3,9 µg [†]
Tamaño de la muestra	1 mL	1 hisopo	1 mL
Peso molecular	> 23 kb	< 23 kb	> 23 kb

[†] Panford-Walsh R., Doukhanine E. y Bouevitch A. (2011). Comparison of DNA from samples collected using ORACollect-DNA (OCR-100) vs. buccal swabs. DNA Genotek. PD-WP-00021.

Contenido del kit OCR-100



Envase



Recolector

Especificaciones del producto

Antes de usar incluyendo el empaque:

Dimensiones: 10,2 x 24,1 x 1,8 cm

Peso: 10 g

Vida útil: 24 meses

Especificaciones después de usar

Diámetro del tubo: 16 mm


Condiciones de almacenamiento:

Temperatura ambiente


Periodo de estabilidad: 60 días

Los tapones RC-1 de repuesto están disponibles como accesorio para almacenar el resto de la muestra después de haber extraído una alícuota, haber quitado el tapón de dos extremos y haberlo desechado.


Fácil recolección

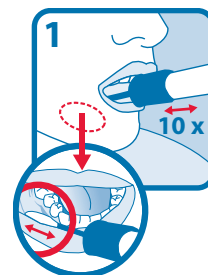


Coloque el hisopo en la boca y frote 10 veces las encías inferiores hacia delante y atrás.

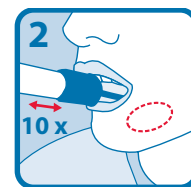


Repita estos movimientos en el lado opuesto de la boca.

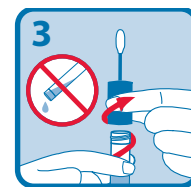

Sostenga el tubo en posición vertical y desenrosque el tapón del tubo.

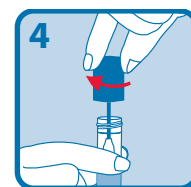

Invierta el tapón, inserte el hisopo en el tubo y ciérrelo herméticamente.

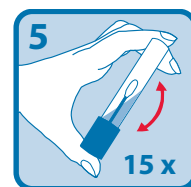

Invierta el tubo tapado y agítelo enérgicamente 15 veces.

Oragene®-DNA y ORACollect®-DNA no están disponibles para la venta en Estados Unidos.

[†] Productos para la investigación sólo uso, no para su uso en procedimientos de diagnóstico.

Algunos productos de DNA Genotek pueden no estar disponibles en todas las regiones geográficas.

*Oragene, ORACollect, OMNIgene y prepliT son marcas registradas de DNA Genotek Inc.

Patente (www.dnagenotek.com/legalnotices)



Para diagnóstico in vitro

Muestras de calidad superior • Eficacia comprobada

PD-BR-00108 (ES - Spanish) Issue 3/2017-06

© 2017 DNA Genotek Inc., una filial de OraSure Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

DNA genotek



www.dnagenotek.com