



唾液样本采集管
(DNA自采集工作包, ORAc collect)
规格型号: ORAc collect-DNA OCR-100
用于体外诊断



采集注意事项:

确保海绵顶部在采集之前并未接触到任何表面。

供者在采集口腔样品前 30 分钟内不得进食、
饮水、吸烟或嚼口香糖。

预期用途: 用于采集和稳定人类唾液样本中的DNA

内含物: 包含 1 个采集工具包

产品描述: 由收集海绵、帽、螺纹盖、收集管及固定液组成

警告和预防措施: 哽塞风险。在将海绵插入供者的口腔时, 应小心谨慎。

如果液体接触到眼睛或皮肤, 请用水冲洗。切勿吞食。请登陆 www.dnagenotek.com 查阅化学品安全技术说明书 (MSDS)。

储存: 15°C | 25°C

工具包的概述和说明:

ORAc collect, 试剂盒中含有采集人口液样本需要的材料和说明。

保质期: 24个月

收集到DNA的存储期: 60天

生产日期: 见产品本身

标签文字说明:

- 目录号
- 体外诊断医疗设备
- CE 标志
- 制造商
- 获授权代表
- 15°C | 25°C 存储说明
- 样本采集方式 (有效期)
- 批号

中文
样本采集说明:

	<p>打开包装并在不接触海绵顶部的前提下取出采集器。尽可能舒适地将海绵置于口腔后部, 并沿着下牙床来回摩擦 (见特写图片)。轻柔地摩擦牙床 10 次。如果可能, 避免摩擦牙齿。</p>
	<p>在口腔的另一侧轻柔地重复此摩擦动作, 沿着下牙床再摩擦 10 次。</p>
	<p>保持玻璃管处于直立状态, 以防止管内的液体溢出。在不接触海绵的前提下, 旋开采集管上的蓝色盖子。</p>
	<p>倒转盖子, 将海绵插入玻璃管并旋紧盖子。</p>
	<p>倒置封盖的玻璃管, 并猛烈地摇晃 15 次。</p>

CE 用于体外诊断

DNAGENOTEK™

生产企业/备案人: DNAGENOTEK INC.
(DNA 吉诺特克股份有限公司)
生产企业地址/备案人住所:
3000 - 500 Palladium Drive,
Ottawa, Ontario, Canada K2V 1C2

电话: +1.613.723.5757
传真: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

代理人及售后服务机构:
名称: 北京捷通康诺医药科技有限公司
地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街20号1幢8层811B
电话: 010-65889599
传真: 010-65889119

备案凭证编号: 国械备20170939号
产品技术要求编号: 国械备20170939号

OCR-100 ORAc collect-DNA 在美国没有市售。
*Oragene 是 DNA Genotek Inc. 的注册商标。
有些地区可能无法购买部分 DNA Genotek 产品, 详情请联系您的销售代表。
所有的 DNA Genotek 方案、白皮书和应用说明均可在我们网站 (www.dnagenotek.com) 的“支持”部分获得。

专利 (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2021 OraSure Technologies, Inc. 旗下公司 DNA Genotek Inc., 保留所有权利
PD-PR-00255 (ZH - Chinese) Issue 5/2021-03 说明书修订日期: 5/2021-03