

Precauzioni per il prelievo:

NON mangiare, bere, fumare o masticare chewing-gum nei 30 minuti precedenti il prelievo del campione di saliva.

NON rimuovere la pellicola di plastica dal cappuccio.

Uso previsto: Per il prelievo di DNA umano da campioni di saliva.

Contenuto: il kit contiene liquido di stabilizzazione.











Avvertenze e precauzioni: Se il liquido di stabilizzazione viene a contatto con occhi o pelle, risciacquare con acqua. Non ingerire. Vedere la scheda di sicurezza riportata su www.dnagenotek.com.

Conservazione: 15°C / 30°C

Riassunto e spiegazione del kit:


Oragene-DNA è un kit di autoprelievo che fornisce i materiali e le istruzioni per il prelievo e la stabilizzazione di campioni di saliva.

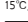Legenda dell'etichetta:

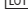	Consultare il foglietto illustrativo allegato alla confezione
	Raccogliere la saliva entro (Usare entro)
	Dispositivo medico diagnostico in vitro
	Numero di catalogo
	Marcatura CE
	Attenzione, consultare le istruzioni per l'uso
	Istruzioni per la conservazione
	Rappresentante autorizzato
	Produttore
	Numero di lotto

Procedimento:


Per la maggior parte delle persone, sono solitamente necessari da 2 a 5 minuti per raccogliere un campione di saliva seguendo i passaggi da 1 a 4.

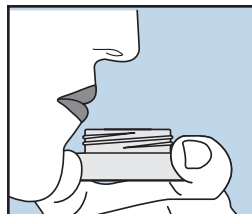


1 Iniziare a raccogliere il campione di saliva.



2 Espellere saliva finché la quantità di saliva liquida (senza bolle) raggiunge il livello mostrato nella figura n. 2.

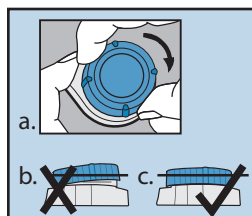

3 Appoggiare il contenitore su una superficie piana. Avvitare il cappuccio del contenitore. Assicurarsi che il cappuccio sia ben chiuso, come mostrato nella figura n. 3c. Se si hanno difficoltà a chiudere completamente il cappuccio, ruotare il cappuccio leggermente in senso antiorario, quindi riprovare.

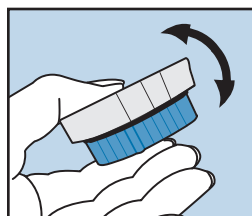

4 Agitare delicatamente per 10 secondi. Riciclare la confezione esterna.