

采集注意事项:

切勿在提供您的唾液样品前 30 分钟内进食、饮水、吸烟或嚼口香糖。

切勿去除容器盖上的塑料膜。

预期用途: 用于人类唾液样本的采集。

指定用途: 从唾液样本搜集人 DNA。

内容: 工具包中含有稳定液体。

产品描述: 产品由漏斗盖、漏斗、管、管盖及稳定液组成。

警告和预防措施: 如果稳定液体接触到您的眼睛或皮肤, 请用水清洗干净。切勿吞食。请登陆 www.dnagenotek.com 查阅化学品安全技术说明书 (MSDS)。

储存: 15°C 至 30°C

工具包的概述和说明:











Oragene•DNA, 使用自采集试剂盒, 试剂盒中含有采集和稳定唾液样本需要的材料和说明。

保质期: 30个月

收集到DNA的存储期: 60个月

生产日期: 见产品本身

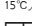标签文字说明:

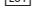
-  查阅包装内的说明书
-  唾液采集方式 (有效期)
-  体外诊断医疗设备
-  目录号
-  CE 标志
-  注意, 请查阅使用说明
-  15°C / 30°C 存储说明
-  获授权代表
-  制造商
-  批号

使用说明


采集前, 请阅读所有说明。

步骤:


遵循步骤 1 至 4, 大多数人需要花费 2 至 5 分钟的时间来交付唾液样品。

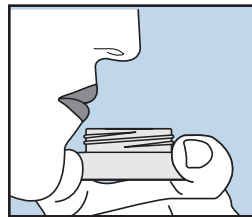


1 开始吐入唾液样本。

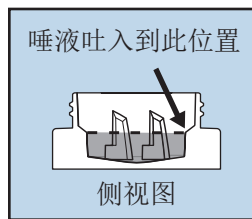

2 吐入唾液, 直到唾液 (非泡沫) 到达图 #2 所示水平。

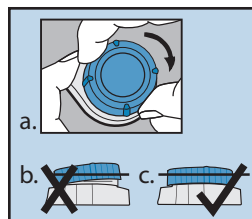

3 将容器置于水平面上。将容器盖装在容器上。确保拧紧容器盖, 如图 #3c 所示。如果您拧紧容器盖有困难, 请逆时针旋转容器盖一点, 然后重试。

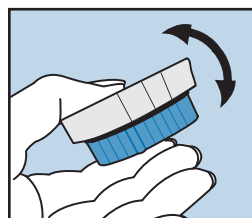


4 轻轻摇晃 10 秒。循环利用外包装。

 Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

代理人及售后服务单位:
名称: 捷通埃默高(北京)医药科技有限公司
地址: 北京市海淀区苏州街18号院-2楼12A08室
电话: 010-82608228
传真: 010-82609915

备案凭证编号: 国械备20170946号
产品技术要求编号: 国械备20170946号

 OG-250 Oragene®•DNA 没有在美国销售。
*Oragene 是 DNA Genotek Inc. 的注册商标。
有些地区可能无法购买部分 DNA Genotek 产品, 详情请联系您的销售代表。
所有的 DNA Genotek 方案、白皮书和应用说明均可在我们网站 (www.dnagenotek.com) 的“支持”部分获得。

专利 (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2017 DNA Genotek Inc.—OraSure Technologies, Inc. 子公司, 保留所有权利。
PD-PR-00312 (ZH - Chinese) Issue 3/2017-09 说明书修订日期: (以备案凭证下发日期为 2017.09.12)

CE 

用于体外诊断

DNAgenotek



生产企业/备案人:  DNA Genotek Inc.
生产企业地址/备案人住所:
3000 - 500 Palladium Drive,
Ottawa, Ontario, Canada K2V 1C2

电话: +1.613.723.5757
传真: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com