



唾液样本采集管  
(DNA自采集工作包, Oragene)  
规格型号: Oragene-DNA OG-250

**采集注意事项:**

切勿在提供您的唾液样品前 30 分钟内进食、饮水、吸烟或嚼口香糖。

切勿去除容器盖上的塑料膜。

预期用途: 用于人类唾液样本的采集。

指定用途: 从唾液样本搜集人 DNA。

内容: 工具包中含有稳定液体。

产品描述: 产品由漏斗盖、漏斗、管、管盖及稳定液组成。

警告和预防措施: 如果稳定液体接触到您的眼睛或皮肤, 请用水清洗干净。

切勿吞食。请登陆 [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) 查阅化学品安全技术说明书 (MSDS)。

储存: 15°C 至 25°C

工具包的概述和说明:

Oragene-DNA, 使用自采集试剂盒, 试剂盒中含有采集和稳定唾液样本需要的材料和说明。

保质期: 30个月

收集到DNA的存储期: 60个月

生产日期: 见产品本身

**标签文字说明:**


- 查阅包装内的说明书
- 唾液采集方式 (有效期)
- 体外诊断医疗设备
- 目录号
- CE 标志
- 注意, 请查阅使用说明
- 15°C 至 25°C 存储说明
- 获授权代表
- 制造商
- 批号

**使用说明**

采集前, 请阅读所有说明。

**步骤:**


遵循步骤 1 至 4, 大多数人需要花费 2 至 5 分钟的时间来交付唾液样品。

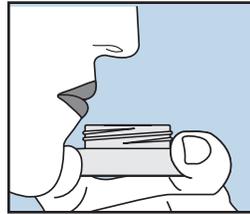


**1** 开始吐入唾液样本。



**2** 吐入唾液, 直到唾液 (非泡沫) 到达图 #2 所示水平。

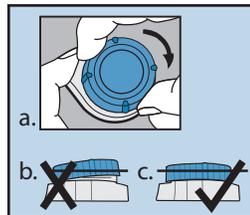

**3** 将容器置于水平面上。将容器盖装在容器上。确保拧紧容器盖, 如图 #3c 所示。如果您拧紧容器盖有困难, 请逆时针旋转容器盖一点, 然后重试。

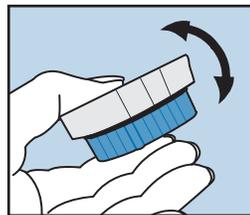

**4** 轻轻摇晃 10 秒。循环利用外包装。



用于体外诊断



生产企业/备案人: ■ DNA Genotek Inc.  
(DNA 吉诺特克股份有限公司)  
生产企业地址/备案人住所:  
3000 - 500 Palladium Drive,  
Ottawa, Ontario, Canada K2V 1C2

电话: +1.613.723.5757  
传真: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

代理人及售后服务机构:  
名称: 北京捷通康诺医药科技有限公司  
地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街20号1幢8层811B  
电话: 010-65889599  
传真: 010-65889119

备案凭证编号: 国械备20170946号  
产品技术要求编号: 国械备20170946号

OG-250 Oragene-DNA 没有在美国销售。  
\*Oragene 是 DNA Genotek Inc. 的注册商标。  
有些地区可能无法购买部分 DNA Genotek 产品, 详情请联系您的销售代表。  
所有的 DNA Genotek 方案、白皮书和应用说明均可在我们网站 ([www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)) 的“支持”部分获得。

专利 ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))  
© 2021 OraSure Technologies, Inc. 旗下公司 DNA Genotek Inc., 保留所有权利  
PD-PR-00312 (ZH - Chinese) Issue 4/2021-03 说明书修订日期: 4/2021-03