

### Försiktighetsåtgärder vid insamling:

Vänta minst 30 min efter att du ätit, druckit, rökt eller tuggat tuggummi innan du avger provet.

Ta INTE bort plastfilmen från trattlocket.

Undvik att spotta ovanför det övre strecket på röret (figur 1).

**Användningsområde:** För insamling av mänsklig DNA från salivprov.

**Innehåll:** Satsen innehåller stabiliseringsvätska.

**Varningar och försiktighetsåtgärder:** Tvätta med vatten om stabiliseringsvätskan kommer i kontakt med ögon eller hud. Får ej förtäras. Se säkerhetsdatablad på adressen [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).






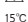




Litet lock, kvävningsrisk.

**Förvaring:** 15°C / 30°C

### Sammanfattning och förklaring av satsen:

Oragene-ONE är en sats för egenprovtagning med material och anvisningar för insamling och stabilisering av salivprover.

### Symbolförklaringar:


	Se bilaga i förpackningen
	Samla saliv senast (använd före)
	In vitro medicinteknisk produkt avsedd för diagnostik
	Katalognummer
	CE-märkning
	Varning, se instruktion för användning
	Anvisning för förvaring
	Behörig representant
	Tillverkare
	Referensnummer

## BRUKSANVISNING


Läs hela anvisningen innan provet avges

### Procedur:


För de flesta personer tar det mellan 2 och 5 minuter att avge ett salivprov enligt punkterna 1 till 5.

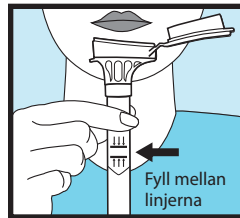


- 1 Spotta en LITEN mängd saliv i tratten. Knacka försiktigt rörets botten mot en plan yta så att saliven kommer ner i röret. Kontrollera att salivvätskans nivå (inte skum) är mellan strecken som visas i figur 1.

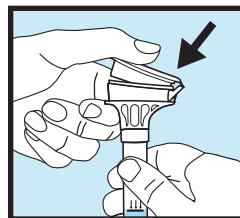


- 2 Håll röret upprätt med ena handen. Stäng trattlocket med den andra handen (enligt figur) genom att trycka till så att ett skarpt klick hörs. Den färgade vätskan i locket kommer att släppas ned i röret och blandas med saliven. Se till att locket sluter tätt.

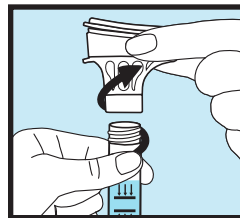

- 3 Håll röret upprätt. Skruva loss tratten från röret.

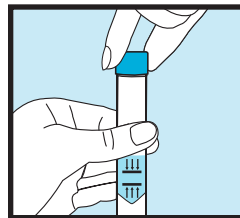

- 4 Sätt på locket så att det sluter tätt mot rörets öppning.

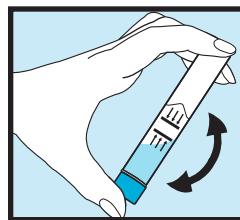

- 5 Skaka det tillslutna röret i 5 sekunder. Kasta munstycket i sopor eller återvinning.