


## BRUGERVEJLEDNING

Læs alle vejledninger inden indsamling

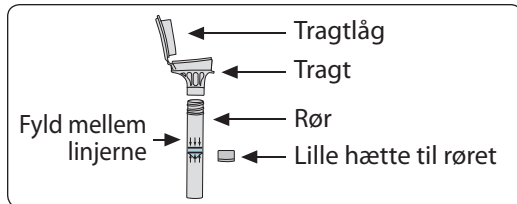

### Forholdsregler ved indsamling:

**UNDLAD at spise, drikke, ryge eller tygge tyggegummi i 30 minutter inden afgivelse af spytpøven.**

**Fjern IKKE plastfilmen fra tragtens låg.**

**UNDGÅ at spytte mere end til rørets øverste streg (figur 1).**

**Tilsigtet anvendelse:** Til indsamling af menneskelig DNA fra spytpøven.

**Indhold:** Sættet indeholder stabiliserende væske.

**Advarsler og forholdsregler:** Skyl med vand hvis den stabiliserende væske kommer i kontakt med øjne eller hud. Må ikke indtages. Se Sikkerhedsdatablad på [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).






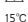




Lille hætte, kvælningsfare.

**Opbevaring:** 15°C / 30°C

### Resumé og forklaring af sættet:


Oragene-ONE er et sæt til selv-indsamling, der leverer materialerne og vejledningen til at indsamle og stabilisere spytpøven.

### Symbolforklaring:


	Se indlægsseddel
	Spyt skal opsamles inden (Anvendes inden)
	Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
	Katalognummer
	CE-mærkning
	Forsigtig, se brugsvejledningen
	Opbevaringsvejledning
	Autoriseret repræsentant
	Fabrikant
	Partinummer

### Procedure:


**De fleste personer er mellem 2 og 5 minutter om at komme med en spytpøve, når de følger trin 1 til 5.**

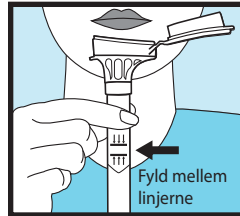


- 1 Spyt en LILLE smule spyt i tragten. Bank forsigtigt bunden af røret mod en flad overflade for at hjælpe spytpøven med at komme ned i røret. Kontrollér at niveauet af flydende spyt (uden bobler) er mellem linjerne vist på billede #1.

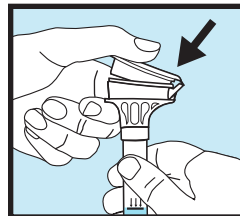


- 2 Hold røret lodret med en hånd. Luk låget med den anden hånd (som vist) ved at trykke fast ned på låget, indtil du hører et højt klik. Den farvede væske i låget vil blive frigjort ind i røret og blandet med spyttet. Sørg for, at låget er lukket tæt.

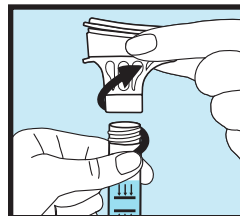

- 3 Hold røret lodret. Skru tragten af røret.

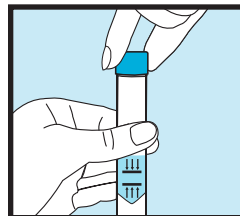

- 4 Brug den lille hætte til at lukke røret tæt til.

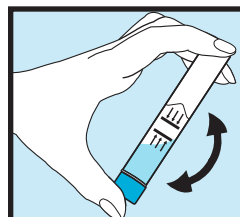

- 5 Ryst røret med hættens påsat i 5 sekunder. Kassér tragten eller aflever den til genbrug.