

Voorzorgen bij afname:

Voordat u uw speekselmonster afstaat mag u 30 minuten daarvoor NIET eten, drinken, roken of kauwgom kauwen.

De dunne plastic film NIET van de trechterdop verwijderen.

Beoogd gebruik: Voor het verzamelen van menselijk DNA uit speekselmonsters.

Inhoud: Kit bevat stabilisatievloeistof.

Waarschuwingen en voorzorgen: Met water spoelen indien de stabilisatievloeistof met de ogen of huid in contact komt. Niet inslikken. Raadpleeg MSDS op www.dnagenotek.com.




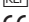






Kleine dop, verstikkingsgevaar.

Opslag: 15°C / 30°C

Samenvatting en toelichting op de kit:

Oragene-ONE is een zelfverzamelingsset die de materialen en instructies bevat voor het verzamelen en stabiliseren van speekselmonsters.

Labelopschrift:


	Raadpleeg de bijsluiter in de verpakking
	Verzamel speeksel niet later dan (Gebruik niet later dan)
	Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnostiek
	Catalogusnummer
	CE-markering
	Voorzichtig, raadpleeg vóór gebruik de instructies
	Opslaginstructies
	Erkende vertegenwoordiger
	Fabrikant
	Lotnummer

GEBRUIKSINSTRUCTIES


Lees vóór de afname alle instructies

Procedure:


Bij de meeste mensen duurt het tussen 2 en 5 minuten om een speekselmonster te geven volgens stappen 1 t/m 5.

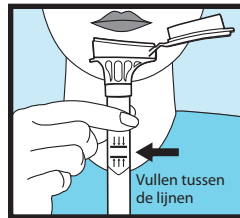


- 1 Spuw in de trechter totdat de hoeveelheid speekselvloeistof (geen belletjes) de in afbeelding 1 getoonde vullijn (fill line) bereikt.

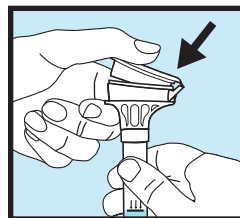


- 2 Houd het buisje met de ene hand rechtop. Sluit met de andere hand het buisje af met de dop (zoals afgebeeld) door stevig op de dop te drukken totdat u een luide klik hoort. De vloeistof in de dop loopt het buisje in en mengt zich met het speeksel. Zorg ervoor dat de dop stevig gesloten is.

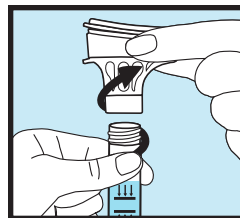

- 3 Houd het buisje rechtop. Schroef de trechter van het buisje af.

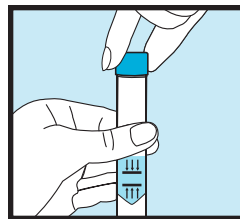

- 4 Gebruik het dopje om het buisje stevig te sluiten.

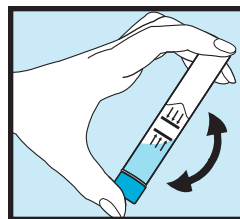

- 5 Schud het buisje met het dopje erop gedurende 5 seconden. Gooi de trechter weg of recycleer hem.