

Precauzioni per il prelievo:

NON mangiare, bere, fumare o masticare chewing-gum nei 30 minuti precedenti il prelievo del campione di saliva.

NON rimuovere la pellicola di plastica dal coperchio dell'imbuto.

NON espellere la saliva sopra la linea superiore della provetta (figura 1).

Uso previsto: Per il prelievo di DNA umano da campioni di saliva.

Contenuto: il kit contiene liquido di stabilizzazione.

Avvertenze e precauzioni: Se il liquido di stabilizzazione viene a contatto con occhi o pelle, risciacquare con acqua. Non ingerire. Vedere la scheda di sicurezza riportata su www.dnagenotek.com.









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

Cappuccio piccolo, pericolo di soffocamento.

Conservazione: 15°C / 30°C

Riassunto e spiegazione del kit:

Oragene-ONE è un kit di autoprelievo che fornisce i materiali e le istruzioni per il prelievo e la stabilizzazione di campioni di saliva.

Legenda dell'etichetta:


	Consultare il foglietto illustrativo allegato alla confezione
	Raccogliere la saliva entro (Usare entro)
	Dispositivo medico diagnostico in vitro
	Numero di catalogo
	Marcatura CE
	Attenzione, consultare le istruzioni per l'uso
	Istruzioni per la conservazione
	Rappresentante autorizzato
	Produttore
	Numero di lotto

ISTRUZIONI PER L'USO


Prima della raccolta, leggere tutte le istruzioni

Procedimento:


Per la maggior parte delle persone, sono solitamente necessari da 2 a 5 minuti per raccogliere un campione di saliva seguendo i passaggi da 1 a 5.

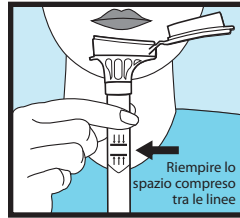


1 Espellere una PICCOLA quantità di saliva nell'imbuto. Picchiettare delicatamente la base della provetta su una superficie piana per consentire alla saliva di avanzare all'interno della provetta. Accertarsi che il livello della saliva liquida (non delle bolle) sia situato tra le linee, come illustrato nella figura n. 1.

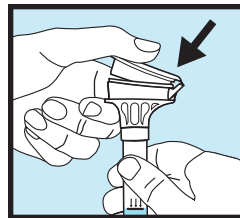


2 Tenere la provetta verticalmente con una mano. Chiudere il coperchio dell'imbuto con l'altra mano come mostrato, premendo il coperchio con decisione fino a sentire chiaramente uno scatto. Il liquido colorato presente nel coperchio verrà rilasciato nella provetta e si mescolerà con la saliva. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso ermeticamente.

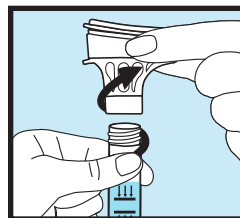

3 Tenere la provetta verticalmente. Svitare la provetta dall'imbuto.

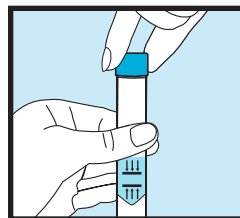

4 Chiudere ermeticamente la provetta utilizzando il cappuccio piccolo.

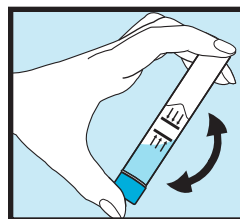

5 Agitare la provetta con il cappuccio inserito per 5 secondi. Scartare o riciclare l'imbuto.