



Προφυλάξεις για τη συλλογή:

MHN τρώτε, πίνετε, καπνίζετε ή μασάτε τσίκλα για 30 λεπτά πριν τη χορήγηση του δείγματος του σάλιου σας.

MHN αφαιρείτε το πλαστικό φιλμ από το πώμα της χοάνης.

MHN πτύετε επάνω από την άνω γραμμή του σωλήνα (εικόνα 1).

Ενδεικνυόμενη χρήση: Για τη συλλογή ανθρώπινου DNA από δείγματα σάλιου.

Περιεχόμενα: Το κιτ περιέχει σταθεροποιητικό υγρό.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις: Ξεπλύνετε με νερό εάν το σταθεροποιητικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. Μην καταπίνετε. Ανατρέξτε στο ΦΔΑΥ, στη διεύθυνση www.dnagenotek.com.






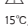




Μικρό καπάκι, κίνδυνος πνιγμού.

Αποθήκευση: 15°C / 30°C

Σύνοψη και επεξήγηση του κιτ:

Το Oragene-ONE είναι ένα κιτ ατομικής συλλογής που παρέχει τα απαραίτητα υλικά και οδηγίες για τη συλλογή και σταθεροποίηση δειγμάτων σάλιου.

Επεξήγηση ετικέτας:

	Ανατρέξτε στο ένθετο της συσκευασίας
	Συλλέξτε το σάλιο έως (Ημ/νία λήξης)
	Ιατρική συσκευή διαγνωστικής χρήσης in vitro
	Αριθμός καταλόγου
	Ένδειξη CE
	Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Οδηγίες αποθήκευσης
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
	Κατασκευαστής
	Αριθμός παρτίδας

Οδηγίες για τον χρήστη


Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη συλλογή

Διαδικασία:


Για τους περισσότερους ανθρώπους απαιτούνται περίπου 2 έως 5 λεπτά για τη χορήγηση ενός δείγματος σάλιου ακολουθώντας τα βήματα 1 έως 5.




1 Πτύστε μια ΜΙΚΡΗ ποσότητα σάλιου στη χοάνη. Χτυπήστε ελαφρά τη βάση του σωλήνα σε μια επίπεδη επιφάνεια ώστε να μετακινηθεί πιο εύκολα το σάλιο μέσα στον σωλήνα. Ελέγξτε ότι το επίπεδο του υγρού σάλιου (όχι φυσαλίδες) είναι μεταξύ των γραμμών που φαίνονται στην εικόνα 1.

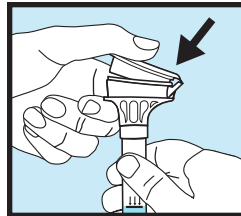


2 Κρατήστε όρθιο τον σωλήνα με το ένα χέρι. Κλείστε το πώμα της χοάνης με το άλλο χέρι (όπως απεικονίζεται) πιέζοντας σταθερά το πώμα έως ότου ακούσετε ένα δυνατό «κλικ». Το χρωματισμένο υγρό στο πώμα θα απελευθερωθεί εντός του σωλήνα και θα αναμειχθεί με το σάλιο. Βεβαιωθείτε ότι το πώμα έχει κλείσει καλά.

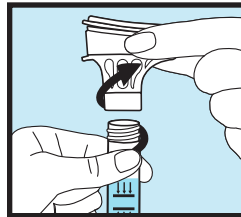

3 Κρατήστε όρθιο τον σωλήνα. Ξεβιδώστε το χωνί από το σωλήνα.

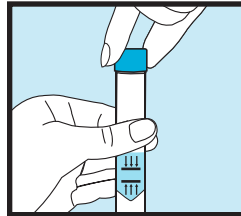

4 Χρησιμοποιήστε το μικρό καπάκι για να κλείσετε καλά τον σωλήνα.

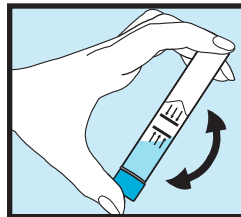

5 Ανακινήστε τον κλεισμένο σωλήνα για 5 δευτερόλεπτα. Απορρίψτε ή ανακυκλώστε τη χοάνη.