


## INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

Leia todas as instruções antes da recolha

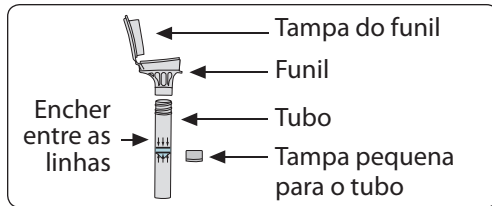

### Precauções para a recolha:

**NÃO coma, não beba, não fume e não masque pastilha elástica durante os 30 minutos que antecedem a recolha da amostra de saliva.**

**NÃO retire a película da tampa do funil.**

**NÃO CUSPA ACIMA da marca superior do tubo (figura 1).**

**Fim a que se destina:** Para a recolha de ADN humano a partir de amostras de saliva.

**Conteúdo:** O kit contém líquido estabilizador.

**Avisos e precauções:** Se o líquido estabilizador entrar em contacto com os olhos ou a pele, enxagúe. Não ingira. Ver a ficha de dados de segurança em [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).






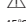




Tampa pequena, risco de asfixia.

**Armazenamento:** 15°C / 30°C

### Sumário e explicação do kit:


Oragene-ONE é um kit de auto-recolha que fornece os materiais e instruções para a recolha e estabilização de amostras de saliva.

### Legenda da etiqueta:


	Consultar a literatura incluída na embalagem
	Recolher saliva até (Utilizar até)
	Dispositivo médico de diagnóstico "in vitro"
	Número de catálogo
	Marca CE
	Atenção: consultar as instruções de utilização
	Instruções de armazenamento
	Representante autorizado
	Fabricante
	Número de lote

### Procedimento:


**A maioria das pessoas demora entre 2 e 5 minutos a produzir a amostra de saliva, seguindo os passos 1 a 5.**

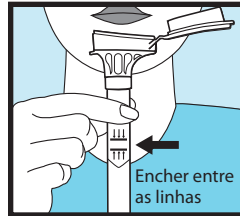


- 1 Cuspa uma quantidade PEQUENA de saliva para dentro do funil. Bata ao de leve na base do tubo pousado numa superfície plana para ajudar a saliva a deslocar-se para dentro do tubo. Verifique se o nível da saliva líquida (não das bolhas) está entre as linhas, como mostrado na figura no.1.

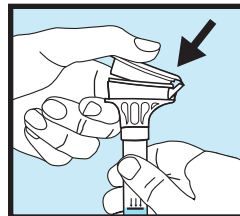


- 2 Mantenha o tubo direito com uma mão. Feche a tampa com a outra mão (tal como ilustrado) empurrando-a com firmeza até ouvir nitidamente um clique. O líquido colorido na tampa é libertado para dentro do tubo para se misturar com a saliva. Assegure-se de que a tampa fica bem fechada.

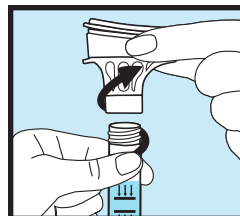

- 3 Mantenha o tubo direito. Desenrosque o funil do tubo.

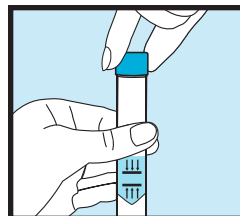

- 4 Use a tampa pequena para fechar bem o tubo.

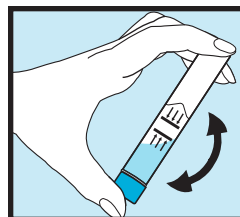

- 5 Agite o tubo fechado com a tampa durante 5 segundos. Deite fora ou recicle o funil.