


唾液样本采集管  
(DNA自采集工作包, Oragene)  
规格型号: Oragene-ONE ON-500/ON-600

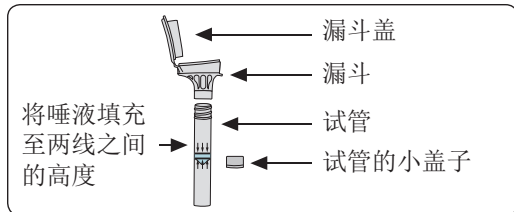

#### 采集注意事项:

切勿在提供您的唾液样品前 30 分钟内进食、饮水、吸烟或嚼口香糖。

切勿去除漏斗盖上的塑料膜。

切勿于试管的顶线上方吐口水 (图1)。

预期用途: 用于人类唾液样本的采集。

指定用途: 从唾液样本搜集人 DNA。

内容: 工具包中含有稳定液体。

产品描述: 产品由漏斗盖、漏斗、管、管盖及稳定液组成。

警告和预防措施: 如果稳定液体接触到您的眼睛或皮肤, 请用水清洗干净。切勿吞食。请登陆 [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) 查阅化学品安全技术说明书 (MSDS)。

小盖子, 哽塞危险。

储存: 15°C 至 30°C

#### 工具包的概述和说明:










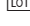
Oragene-ONE, 使用自采集试剂盒, 试剂盒中含有采集和稳定唾液样本需要的材料和说明。

保质期: 12个月

收集到DNA的存储期: 24个月

生产日期: 见产品本身

#### 标签文字说明:


-  查阅包装内的说明书
-  唾液采集方式 (有效期)
-  体外诊断医疗设备
-  目录号
-  CE 标志
-  注意, 请查阅使用说明
-  15°C / 30°C 存储说明
-  获授权代表
-  制造商
-  批号

## 使用说明


采集前, 请阅读所有说明。

### 步骤:


遵循步骤 1 至 5, 大多数人需要花费 2 至 5 分钟的时间来交付唾液样品。

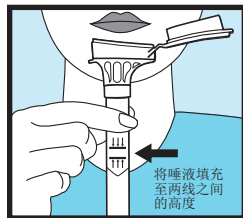


- 1 将少量口水吐至漏斗中。轻拍试管的平整底面, 以帮助唾液进入试管。检查液体唾液 (而非气泡) 的水平高度是否位于两线之间, 如图 #1 所示。

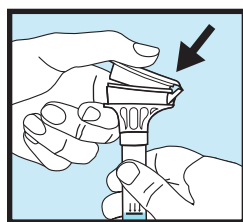


- 2 单手持试管, 令其处于直立状态。另一只手用力按压盖子 (如图所示), 将盖子盖紧, 直到听见响亮的咔嚓声。盖子中的着色液体将流入试管, 同唾液混合。确保盖子盖紧。

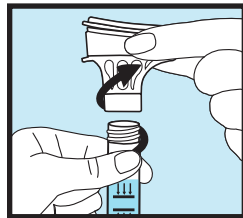

- 3 保持试管处于直立状态。从试管上拧下漏斗。

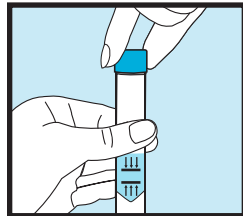

- 4 使用小盖子盖紧试管。

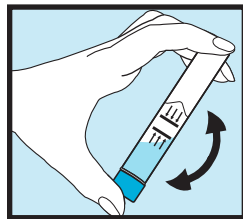


- 5 摇晃加盖的试管 5 秒钟。丢弃或重复利用漏斗。

  Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

代理人及售后服务单位:  
名称: 捷通埃默高(北京)医药科技有限公司  
地址: 北京市海淀区苏州街18号院-2楼12A08室  
电话: 010-82608228  
传真: 010-82609915

备案凭证编号: 国械备20170946号  
产品技术要求编号: 国械备20170946号

 ON-500/ON-600 Oragene<sup>®</sup>ONE 没有在美国销售。  
\*Oragene 是 DNA Genotek Inc. 的注册商标。  
有些地区可能无法购买部分 DNA Genotek 产品, 详情请联系您的销售代表。  
所有的 DNA Genotek 方案、白皮书和应用说明均可在我们网站 ([www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)) 的“支持”部分获得。

专利 ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))  
© 2018 DNA Genotek Inc.—OraSure Technologies, Inc. 子公司, 保留所有权利。  
PD-PR-00340 (ZH - Chinese) Issue 4/2018-07 说明书修订日期: (以备案凭证下发日期为准 2018.05.07)



用于体外诊断

**DNAgenotek**



生产企业/备案人:  DNA Genotek Inc.  
生产企业地址/备案人住所:  
3000 - 500 Palladium Drive,  
Ottawa, Ontario, Canada K2V 1C2

电话: +1.613.723.5757  
传真: +1.613.723.5057  
[info@dnagenotek.com](mailto:info@dnagenotek.com)  
[www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)