


使用方法

採取の前に、使用上の注意を必ずすべてお読みください。

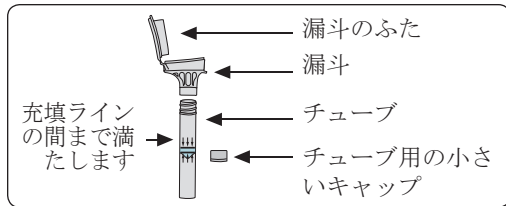

採取における注意事項:

唾液のサンプルを採取する30分前から、飲食、喫煙、ガムを噛むことは控えてください。

漏斗のふたからプラスチックフィルムを取り除かないでください。

唾液の量がチューブの上の線を超えないようにしてください(図1)。

使用目的: 唾液サンプルのヒトDNA採取用。

内容物: キットには安定液が含まれています。

警告および注意: 安定液が目に入ったり皮膚に接触した場合は、水で洗い流してください。体内に摂取しないでください。

www.dnagenotek.comで製品安全データシートをご確認ください。




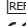

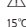




小さいキャップ、のどに詰まる危険性あり

保管: 15°C/30°C

キットの概要および説明:


Oragene[®]ONE、唾液検体の採取と安定化のための用具と説明書が含まれている自己採取用キットです。

ラベルの説明:

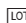
	パッケージ同封物を参照してください
	唾液採取期限 (使用期限)
	インビトロ診断用医療器具
	カタログ番号
	CEマーキング
	注意、使用方法については使用上の注意をご覧ください
	15°C/30°C 保管方法の説明
	正規代理店
	製造者
	製造番号

手順:


ほとんどの方は、以下の1~5の手順に従って唾液のサンプルを採取するのに2~5分かかります。

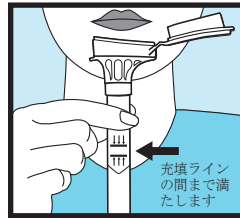


- 1 漏斗に少量の唾液を吐きます。平らな面でチューブの底を軽くたたき、唾液をチューブ内に移動させます。唾液(唾泡を除く)の量が図1に示されている線の間にあることを確認します。

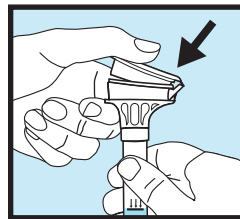


- 2 チューブを片手で真っ直ぐに立てて保持します。もう一方の手で漏斗のふたをしっかりと押し下げて閉めます(図を参照)。カチッという音がします。ふたに含まれる色付きの液体がチューブ内に放出され、唾液に混合されます。ふたがしっかりと閉まっていることを確認します。

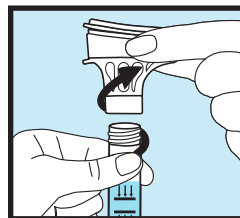

- 3 チューブを真っ直ぐに立てて保持します。試験管から漏斗をねじって外します。

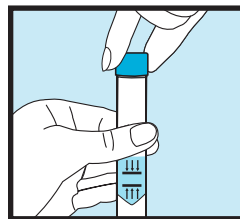

- 4 小さなキャップでチューブをしっかりと密封します。

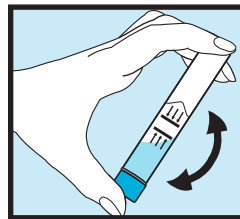

- 5 キャップで密封したチューブを5秒間振ります。漏斗は廃棄または再利用します。