

הוראות למשתמש

קרא את כל ההוראות לפני השימוש


התהליך:

לרוב האנשים דרוש בין 2 ל-5 דקות לספק דגימת רוק על פי צעדים 1 עד 5.


1 יש לירוק לתוך המשפך עד שכמות הרוק הנוזלי (לא בועות) מגיעה לקו המילוי כמוצג באיור 1.




2 החזק את המבחנה במאונך ביד אחת. סגור את מכסה המשפך בידך השניה (לפי האיור) באמצעות דחיפה חזקה של המכסה עד שתשמע נקישה חזקה. הנוזל שבמכסה ישתחרר לתוך המבחנה ויתערבב עם הרוק. וודא שהמכסה סגור היטב.

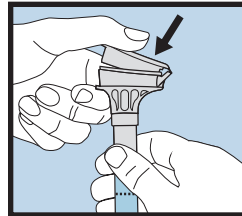



3 החזק את המבחנה במאונך. שחרר את הברגת המשפך מהמבחנה.

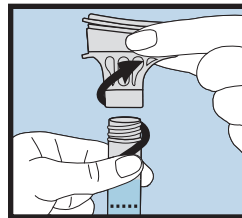

4 השתמש במכסה הקטן כדי לסגור את המבחנה היטב.

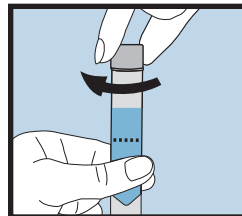

5 נער את המבחנה הסגורה למשך 5 שניות. זרוק את המשפך או מחזר אותו.

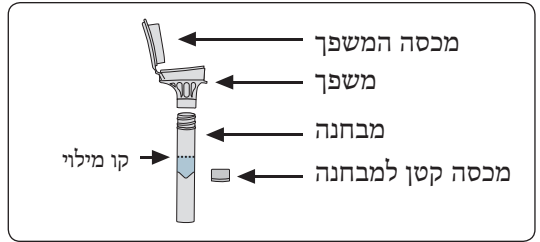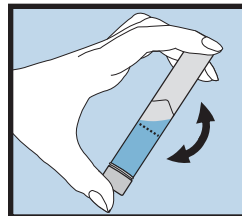

אמצעי זהירות ללקיחת דגימות:

הימנע מאכילה, שתיה, עישון ולעיסת מסטיק במשך 30 דקות לפני לקיחת דגימת רוק.

אין להסיר את יריעת הפלסטיק ממכסה המשפך.

שימוש מיועד: לאיסוף דנ"א אנושי מדגימות רוק.

תכולה: הערכה מכילה נוזל מייצב.

אזהרות ואמצעי זהירות: יש לרחוץ במים אם הנוזל המייצב בא במגע עם העיניים או העור אין לבלוע. ר' דף נתוני בטיחות באתר www.dnagenotek.com

מכסה קטן, סכנת חנק.

אחסנה: 15-30 מעלות צלסיוס

תמצית והסבר על הערכה:

Oragene®DNA היא ערכה לאיסוף עצמי המספקת את החומרים וההוראות לאיסוף וייצוב דגימות רוק.

מקרא לתיות:

- קרא את העלון המצורף
- אסוף את הרוק עד (לשימוש עד)
- התקן רפואי לאבחון מחוץ לגוף
- מספר קטלוגי
- סימול CE
- אזהרה, יש לקרוא את ההוראות השימוש
- 15°C / 30°C הוראות אחסנה
- הנציג המוסמך
- יצרן
- מספר מנה

