

Za in vitro dijagnostičku uporabu



Mjere opreza pri prikupljanju:

Vrh spužve NE smije doći u doticaj s bilo kojom površinom prije prikupljanja.

Davatelj ne smije jesti, piti, pušiti, žvakati žvakaću gumu 30 minuta prije prikupljanja oralnog uzorka.

Svrha uporabe: Ovaj je proizvod namijenjen prikupljanju i stabilizaciji DNK iz ljudskih oralnih uzoraka.

Sadržaj: Sadrži 1 komplet za prikupljanje.

Upozorenje i mjere opreza: Opasnost od gušenja. Budite oprezni pri stavljanju spužve u usta.

Isperite vodom ako tekućina dođe u doticaj s očima ili kožom. NEMOJTE progutati. Vidi sigurnosno-tehnički list na www.dnagenotek.com.

Čuvanje: 15 ± 25°C

Sažetak i pojašnjenje kompleta:

ORACollect[®]DNA je komplet za samoprikupljanje koji sadrži materijale i upute za prikupljanje ljudskih oralnih uzoraka.

Objašnjenje oznake:

REF	Kataloški broj
MD	In vitro dijagnostički medicinski uređaj
CE	CE označavanje
	Proizvođač
EC REP	Ovlašteni predstavnik
15°C ± 25°C	Upute za čuvanje
	Prikupljanje uzorka od strane (uporaba od strane)
LOT	Broj šarže

Upute za prikupljanje uzorka:

	<p>Otvorite pakiranje i izvucite aplikator bez dodirivanja vrha spužve. Položite spužvu udobno što je moguće više odostraga u ustima i pokretom naprijed-nazad protrljajte donje desni (vidi sliku izbliza). Nježno protrljajte desni 10 puta. Ako je moguće, izbjegavajte trljanje zubi.</p>
	<p>Nježno ponovite pokret trljanja donjih desni na suprotnoj strani usta još 10 puta.</p>
	<p>Držite epruvetu uspravno kako biste spriječili da tekućina istječe iz nje. Odrvnite plavi čep epruvete za prikupljanje bez dodirivanja spužve.</p>
	<p>Okrenite čep prema dolje, stavite spužvu u epruvetu i čvrsto zatvorite čep.</p>
	<p>Okrenite začepljenu epruvetu i snažno ju protresite 15 puta.</p>