
**Försiktighetsåtgärder vid insamling:**

Se till att svampens spets **INTE** kommer i kontakt med någon annan yta före insamlingen.

Givaren får **INTE** ha ätit, druckit, rökt eller tuggat tuggummi under minst 30 minuter före ett salivprov.

**Användningsområde:** Denna produkt är utvecklad för uppsamling och stabilisering av DNA från mänskliga munprov.

**Innehåll:** Innehåller 1 provtagningsatts.

**Varningar och försiktighetsåtgärder:**

Kvävningsrisk. Var försiktig när du för in svampen i munnen.









Tvätta av med vatten om vätskan kommer i kontakt med ögon eller hud. Får ej förtäras. Se säkerhetsdatablad på adressen [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).


**Förvaring:** 15-25°C

**Sammanfattning och förklaring av satsen:**


ORACollect-DNA är en sats för egenprovtagning som ger material och anvisningar för insamling av mänskligt oralprov.

**Symbolförklaringar:**

	Katalognummer
	In vitro medicinteknisk produkt avsedd för diagnostik
	CE-märkning
	Tillverkare
	Behörig representant
	Anvisning för förvaring
	Ta prov senast (använd före)
	Referensnummer

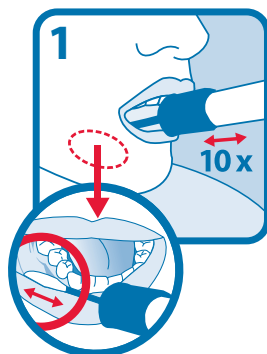**Instruktioner för provtagning:**


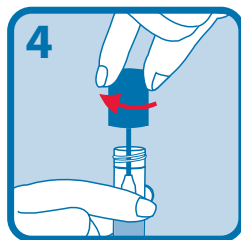
Öppna förpackningen och ta bort samlaren utan att vidröra svampen. Placera svampen så långt bak i munnen som du kan utan att orsaka kväljningar och gnugga längs det nedre tandkötet (se närbild) med en fram och tillbaka-rörelse. Gnugga försiktigt mot tandkötet 10 gånger. Undvik om möjligt att gnugga mot tänderna.

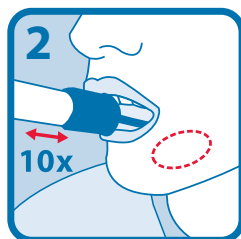


Upprepa försiktigt gnuggandet ytterligare 10 gånger på motsatt sida av munnen längs det nedre tandkötet.



Håll röret upprätt för att förhindra att vätskan i röret rinner ut. Skruva loss det blå locket från provröret utan att vidröra svampen.



Vrid locket upp och ner, stick in svampen i röret och stäng locket ordentligt.

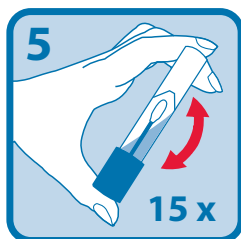

Vänd på det tillslutna röret och skaka kraftigt 15 gånger.



För in vitro-diagnostik

**DNAgenotek**



*Utmärkta prov*

*Dokumenterad effekt*

