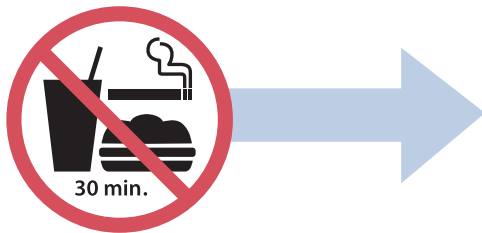


Voor in-vitro diagnostisch gebruik


Voorzorgsmaatregelen afname:

Zorg ervoor dat de punt met het sponsje vóór afname van een monster NIET in contact komt met oppervlakken.

De donor mag 30 minuten voorafgaand aan de afname van een speekselmonster NIET eten, drinken, roken of kauwgom kauwen.

Beoogd gebruik: Dit product is ontworpen voor de afname en stabilisatie van DNA uit humane speekselmonsters.

Inhoud: Bevat 1 testkit












Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: Gevaar voor verstikking. Wees voorzichtig bij het in de mond plaatsen van het sponsje.

Met water wassen als de stabilisatievloeistof in contact komt met de ogen of de huid. NIET inslikken. Zie VIB op www.dnagenotek.com

Opslag: 15 °C-25 °C

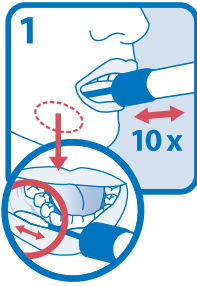
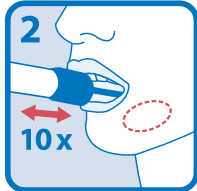

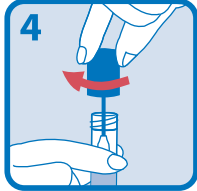
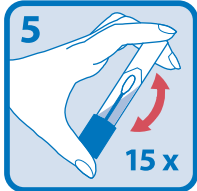
Samenvatting en uitleg over de kit: ORACollect-DNA is een zelfafnamekit met de materialen en instructies voor het afnemen van een humaan speekselmonster.

Legenda etiket:

	Catalogusnummer
	In-vitro diagnostisch medisch hulpmiddel
	CE-markering
	UKCA-markering
	Fabrikant
	Medisch hulpmiddel
	Niet hergebruiken
	Raadpleeg instructies voor gebruik
	Gebruiken vóór
	Partijnummer
	Geautoriseerd vertegenwoordiger

NEDERLANDS

Instructies voor monstername:

	<p>Open de verpakking en verwijder de afnamekit zonder de punt van het sponsje aan te raken. Plaats het sponsje zo ver mogelijk achterin de mond en wrijf met een voor- en achterwaartse beweging over het onderste tandvlees (zie detailweergave). Wrijf 10 keer voorzichtig over het tandvlees. Wrijf indien mogelijk niet over de tanden.</p>
	<p>Herhaal voorzichtig de wrijvende beweging aan de andere kant van de mond, over het onderste tandvlees, wederom 10 keer.</p>
	<p>Houd het buisje rechtop om morsen van de stabilisatievloeistof in het buisje te voorkomen. Schroef de blauwe dop van het buisje zonder het sponsje aan te raken.</p>
	<p>Draai de dop ondersteboven en plaats het sponsje in het buisje en sluit dit stevig met de dop.</p>
	<p>Keer het afgesloten buisje om en schud het 15 keer stevig.</p>