

**Instructies voor monsterafname:**

**Voorzorgen bij afname:**

Zorg dat de punt van het wattenstaafje vóór de afname NIET in contact komt met enig oppervlak.

De donor mag gedurende de 30 minuten voor het afnemen van het orale monster NIET eten, drinken, roken of kauwgom kauwen.

**Beoogd gebruik:** Dit product is bestemd voor het verzamelen en stabiliseren van DNA uit orale monsters.

**Inhoud:** Bevat 1 afnamekit.

**Waarschuwing en voorzorgen:** Verstikkingsgevaar. Het wattenstaafje moet voorzichtig in de mond worden gebracht.



Wassen met water indien vloeistof in contact komt met de ogen of de huid. Niet inslikken. Raadpleeg MSDS op [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).


**Opslag:** 15-25°C

**Samenvatting en toelichting op de kit:**


ORAcollect-DNA is een zelfverzamelingsset die de materialen en instructies bevat voor het verzamelen van humane orale monsters.

**Labelopschrift:**


REF	Catalogusnummer
IVD	Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnostiek
CE	CE-markering
	Fabrikant
EC REP	Erkende vertegenwoordiger
15°C-25°C	Opslaginstructies
	Monster uiterlijk afnemen op (uiterste gebruiksdatum)
LOT	Lotnummer

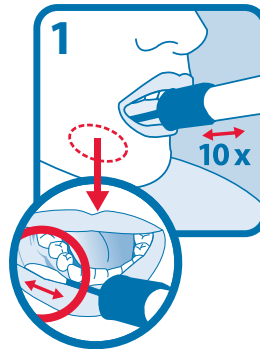


Open de verpakking en verwijder het wattenstaafje zonder het uiteinde met de watten aan te raken. Plaats het wattenstaafje zo ver als comfortabel is in de mond en wrijf heen en weer over het tandvlees aan de onderkant (zie close-up afbeelding). Wrijf voorzichtig 10 maal heen en weer over het tandvlees. Voorkom, indien mogelijk, dat u langs de tanden gaat.

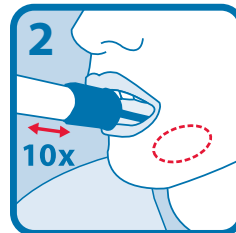


Herhaal de handeling nogmaals 10 maal voorzichtig aan de andere kant van de mond langs het onderste tandvlees.

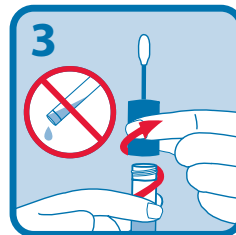

Houd het buisje rechtop om te voorkomen dat u de vloeistof in het buisje morst. Schroef de dop van het testbuisje zonder het wattenstaafje aan te raken.

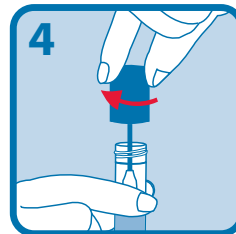

Draai de dop op de kop, steek het wattenstaafje in het buisje en sluit deze goed af met de dop.

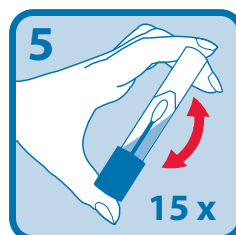

Draai het afgesloten buisje om en schud het 15 maal stevig.



**Uitsluitend voor in vitro diagnostisch gebruik**



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

**DNAgenotek**

*Superieure monsters  
Bewezen resultaten*

DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tel: +1.613.723.5757  
Fax: +1.613.723.5057  
[info@dnagenotek.com](mailto:info@dnagenotek.com)  
[www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

ORAcollect-DNA wordt niet verkocht in de Verenigde Staten.  
\*ORAcollect is een gedeponerd handelsmerk van DNA Genotek Inc.  
Sommige DNA Genotek producten zijn mogelijk niet in alle geografische regio's verkrijgbaar, neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.  
Alle DNA Genotek producten, technische documentatie en toepassingsaantekeningen, zijn beschikbaar in het onderdeel 'support' van onze website op [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Octrooi ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))  
© 2019 DNA Genotek Inc., een dochteronderneming van OraSure Technologies, Inc., alle rechten voorbehouden.  
PD-PR-00392 (NL - Dutch) Issue 2/2019-10