

サンプル採取についての説明書:



採取における注意事項:

採取前にスポンジの先を他の場所に触れさせないようにしてください。

ドナーは口腔サンプル採取の30分前は飲食、喫煙したり、ガムを噛んだりしないようにしてください。

使用目的:本製品は、ヒトの口腔サンプルの採取とDNA安定化用に設計されています。

内容物:採取キット1つを含む

警告および注意:のどに詰まる危険性 スポンジを口に入れる際には細心の注意を払ってください。

液体が目や皮膚に触れた場合は水で洗い流してください。体内に摂取しないでください。
www.dnagenotek.comで製品安全データシートをご確認ください

保管: 15~25°C

キットの概要および説明:

ORAcollect•DNA、ヒト口内サンプルを採取するための用具と説明書が含まれている自己採取用キットです。

ラベルの説明:

REF	カタログ番号
MD	インビトロ診断用医療器具
CE	CEマーキング
製造者	
EC REF	正規代理店
15°C / 25°C	保管方法の説明
試料収集者(使用者)	
LOT	ロット番号

<p>1</p> <p>10x</p>	<p>パッケージを開き、スポンジの先には触らずに採取容器を取り出します。スポンジを口内の奥のほうに入れ、下の歯茎との間を往復するように入れて(拡大図参照)ゆっくり擦ります。10回ほどゆっくりと歯茎を擦ります。できるだけ歯は擦らないようにしてください。</p>
<p>2</p> <p>10x</p>	<p>口内の反対側下部の歯茎との間で同じように10回ほどゆっくりと擦る動作を繰り返します。</p>
<p>3</p>	<p>チューブを真っ直ぐに持ち、中の液がこぼれないようにします。スポンジに触らずに採取用チューブから青いキャップを取り外します。</p>
<p>4</p>	<p>キャップを裏返し、チューブにスポンジを入れて密封します。</p>
<p>5</p> <p>15x</p>	<p>キャップを開めたチューブを逆さにし、15回ほど強く振ります。</p>



インビトロ診断用



優れたサンプル
実証済みのパフォーマンス

■ DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

電話:+1.613.723.5757
ファックス:+1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

ORAcollect•DNAはアメリカで販売されていません。
*ORAcollectはDNA Genotek Inc.の登録商標です。
DNA Genotek製品の中には、各地域で販売されていない製品もありますので、詳細は各地域の販売担当者にお問い合わせください。
DNA Genotekのプロトコル、ホワイトペーパー、使用説明書は全て、当社ウェブサイト(www.dnagenotek.com)のサポートセクションで提供しています。

特許(www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2019 DNA Genotek, Inc., OraSure Technologies, Inc.の子会社、無断複写・複製・転載を禁ず
PD-PR-00397 (JA - Japanese) Issue 2/2019-10