

Ohjeet näytteenottoa varten:

Näytteenoton varoitoimet:

Varmista, että sienen pää EI pääse kosketuksiin mihinkään pintaan ennen näytteenottoa.

Luovuttajan EI pidä syödä, juoda, polttaa tai pureskella purukumia 30 minuuttia ennen suunäytteen ottamista.

Käyttötarkoitus: Tämä tuote on tarkoitettu DNA:n keräämiseen ja stabilointiin ihmisen suunäytteistä.

Sisältö: Sisältää 1 näytteenottopakkauksen.

Varoitukset ja varoitoimet: Tukehtumisvaara. Tulee noudattaa varovaisuutta asettaessa sientä suuhun.

Huuhtelee vedellä, jos neste joutuu kontaktiin silmien tai ihon kanssa. Älä niele.








Katso MSDS osoitteesta www.dnagenotek.com.


Säilytys: 15-25°C

Yhteenveto ja pakkauksen selitys:


ORACollect-DNA on itsekeräyssarja, joka sisältää ihmisen suunäytteen keräämiseen tarvittavat materiaalit ja ohjeet.

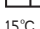Etiketin selitys:

	Luettelonumero
	Lääkealan väline koeputkidiagnostiikkaan
	CE-merkintä
	Valmistaja
	Valtuutettu edustaja
15°C-25°C	Säilytysohjeet
	Kerää näyte ennen (käytä ennen)
	Eränumero

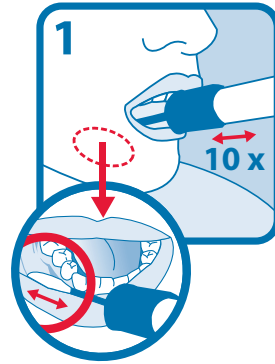


Avaa pakkaus ja poista näytteenotin koskematta sienen kärjellä. Aseta sieni suussa niin kauas taakse kuin tuntuu mukavalta ja hankaa pitkin alaikieniä (katso lähikuva) edestakaisella liikkeellä. Hankaa hellävaroen ikeniä 10 kertaa. Mikäli mahdollista, vältä hankaamista hampaista.

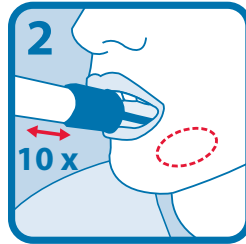


Toista hellävarainen hankaamislake vastakkaisella puolella suuta pitkin alaikieniä ylimääräiset 10 kertaa.



Pidä putki pystysuorassa estääksesi nestettä putken sisällä läikkymästä. Ruuvaa sininen korkki irti näytteenottoputkesta ilman, että kosketat sientä.

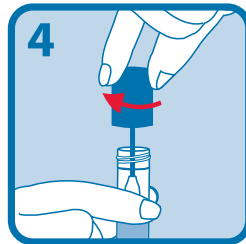

Käännä korkki ylösalaisin, aseta sieni sisään putkeen ja sulje korkki tiiviisti.

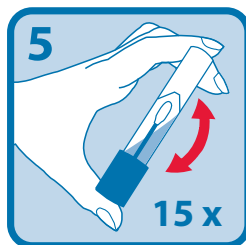

Käännä korkillinen putki nurin päin ja ravista voimakkaasti 15 kertaa.



Ainoastaan in vitro-diagnostiseen käyttöön



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

DNAgenotek


Erinomaisia näytteitä todistettu tulos

Valmistettu Kanadassa
 DNA Genotek Inc.
 3000 - 500 Palladium Drive
 Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Puh.: +1.613.723.5757
 Faksi: +1.613.723.5057
 info@dnagenotek.com
 www.dnagenotek.com

ORACollect*-DNA ei ole myynnissä Yhdysvalloissa.

*ORACollect on DNA Genotek Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

Joitakin DNA Genotek tuotteita ei ehkä ole saatavilla kaikkialla, ota yhteyttä myynti edustajaan.

DNA Genotek protokollat, valkoiset kirjat ja soveltaminen toteaa, ovat saatavilla tukiosiota kotisivuiltamme www.dnagenotek.com.

Patentti (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2017 DNA Genotek Inc., OraSure Technologies Inc. -yhtiön tytäryhtiö, kaikki oikeudet pidätetään.
 PD-PR-00399 (FI- Finnish) Issue 2/2017-06