

Samenvatting en uitleg van de set:

OMNigene-GUT levert de materialen en aanwijzingen voor afname en stabilisatie van microbiële DNA uit een fecesmonster.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

- UITSLUITEND VOOR UITWENDIG GEBRUIK.
- De gele bovenkant van de buis NIET verwijderen.
- De stabilisatievloeistof in de buis NIET morsen.
- Als de vloeistof in contact komt met de ogen of huid, wassen met water. NIET inslikken.
- Voor afname van een vloeibaar monster, de afzonderlijk geleverde gebruiksinstructies raadplegen.
- Kleine voorwerpen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

Opslag: 15 °C tot 25 °C

Verzenden conform de geldende regelgeving voor het vervoer van biologische monsters. Zie VIB op www.dnagenotek.com.

Legenda bij etiket:

- Monster uiterlijk afnemen op (uiterste gebruiksdatum)
- Catalogusnummer
- Fabrikant
- 15°C, 25°C Instructies voor opslag
- Let op, raadpleeg gebruiksaanwijzing
- Lotnummer


GEBRUIKSINSTRUCTIES

Lees vóór de afname alle instructies

Procedure:



- 1 BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN:**
- Leeg uw blaas voordat met afname wordt begonnen.
 - Vang het fecesmonster op, zonder urine of wc-water.
 - Toiletpapier of papieren zakdoekjes kunnen nodig zijn.

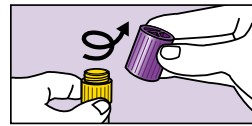


- 2** Houd de gele bovenkant van de buis vast, schroef ALLEEN de paarse dop los en leg deze weg voor later gebruik.



BELANGRIJK:


Verwijder NIET de gele bovenkant van de buis. Mors GEEN stabilisatievloeistof in de buis.

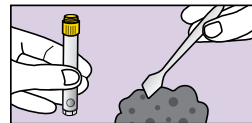

- 3** Gebruik het spateltje om een klein fecesmonster te nemen.




Fecesmonster op werkelijke grootte.

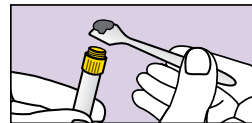

- 4** Breng het fecesmonster over in de gele bovenkant van de buis. Herhaal dit totdat het monster de gele bovenkant van de buis vult.




BELANGRIJK: Duw het monster NIET in de buis.

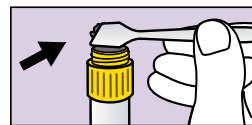


- 5** Schraap horizontaal langs de bovenkant van de buis om het monster vlak te maken en overtollig materiaal te verwijderen.


Veeg de buitenkant en de bovenkant van de buis indien nodig af met toiletpapier of papieren zakdoekjes.

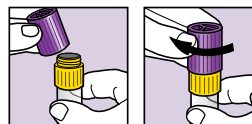

- 6** Pak de paarse dop vast met het harde uiteinde omlaag gericht en draai de dop stevig op de gele bovenkant van de buis.

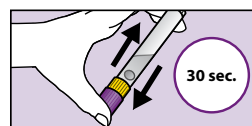

- 7** Schud de afgesloten buis zo hard en snel mogelijk heen en weer gedurende minimaal 30 seconden.

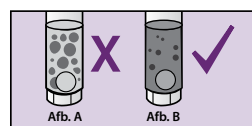

- 8** Het fecesmonster wordt in de buis met de stabilisatievloeistof gemengd; niet alle deeltjes lossen op.

BELANGRIJK: Blijf schudden als er grote deeltjes overblijven, zoals weergegeven in afbeelding A.



- 9** Plaats het spateltje in de originele verpakking of wikkel het in toiletpapier en gooi het weg bij het afval.

BELANGRIJK: Verstuur het monster voor verwerking volgens de afleverinstructies van de leverancier van de set.