

Keräyssarjan yhteenveto ja selitys:

OMNigene-GUT sisältää tarvittavat materiaalit ja ohjeet mikrobi-DNA:n keräämiseen ja stabilointiin ulostenäytteestä.

Varoitukset ja varoimet:

- VAIN ULKOISEEN KÄYTTÖÖN.
- ÄLÄ irrota putkesta sen keltaista yläosaa.
- ÄLÄ läikytä putkessa olevaa stabilointinestettä.
- Jos nestettä joutuu silmiin tai iholle, pese vedellä. Ei saa niellä.
- Jos ulostenäyte on nestemäinen, katso erillisenä toimitetut käyttöohjeet.
- Pienet esineet voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Varastointi: 15–25 °C

Lähetä biologisten näytteiden kuljetusta koskevien sovellettavien määräysten mukaisesti. Katso käyttöturvallisuustiedote osoitteesta www.dnagenotek.com

Merkintöjen selitteet:

- Kerää näyte ennen (käytä ennen)
- Luettelonumero
- Valmistaja
- Varastointiohjeet
- Huomio, katso käyttöohjeet
- Eränumero

KÄYTTÖOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen keräystä

Toimintaohje:




- 1 TÄRKEÄT VALMISTELUT:**
- Tyhjennä virtsarakko ennen näytteen ottoa.
 - Kerää ulostenäyte, jossa ei ole virtsaa eikä WC-altaan vettä.
 - WC-paperi tai -paperipyyhkeet voivat olla tarpeellisia.




- 2** Pidä kiinni putkilon keltaisesta yläosasta ja ruuvaa auki ainoastaan violetti korkki ja laita se sivuun myöhempää käyttöä varten.



TÄRKEÄÄ:
ÄLÄ irrota putken keltaista yläosaa.
ÄLÄ läikytä putkessa olevaa stabilointinestettä.

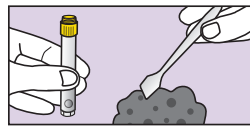


- 3** Kerää pieni määrä ulostetta lastalla.

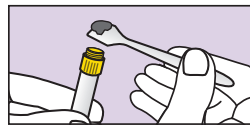

- 4** Siirrä ulostenäyte putkilon keltaiseen yläosaan. Toista kunnes näyte täyttää putkilon keltaisen yläosan.




TÄRKEÄÄ: ÄLÄ työntä näytettä putkeen.

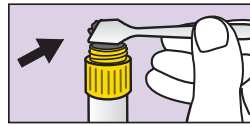

- 5** Tasaa ulostenäyte ja poista ylimääräinen näyte pyyhkäisemällä lastalla putken yläreunaa vaakasuuntaisesti.


Pyyhi putken ja sen yläosan ulkopinta tarvittaessa WC-paperilla tai -paperipyyhkeellä.

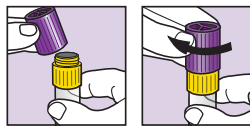

- 6** Ota violetti korkki käteen niin, että kiinteä puoli osoittaa alaspäin, ja kierrä se putken keltaiseen yläosaan tiiviisti kiinni.



- 7** Ravista suljettua putkea lujasti ja nopeasti edestakaisella liikkeellä vähintään 30 sekunnin ajan.

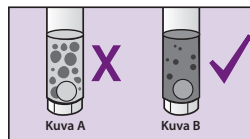

- 8** Ulostenäyte sekoittuu putkessa olevaan stabilointinesteseen. Kaikki hiukkaset eivät liukene.

TÄRKEÄÄ: Jatka ravistamista, jos putkessa on edelleen suuria kiinteitä palasia, kuten kuvassa A.



- 9** Laita lasta alkuperäiseen pakkaukseen tai kääri se WC-paperiin ja hävitä roskien mukana.

TÄRKEÄÄ: Lähetä näyte tutkittavaksi palvelun tarjoajan antamia ohjeita noudattaen.