

### সংগ্রহের পূর্বে সতর্কতা:

আপনার লালার নমুনা দেওয়ার 30 মিনিট আগে কিছু খাবেন না, পান করবেন না, ধূমপান করবেন না বা চুইং গাম খাবেন না।

ফানেলের ঢাকনা থেকে প্লাস্টিকের ফিল্মটি সরিয়ে ফেলবেন না।

অভিপ্রেত ব্যবহার: লালা নমুনা থেকে মানুষের ডিএনএ সংগ্রহের জন্য।

বিষয়বস্তু: কিটে স্থিতিশীলযুক্ত তরল পদার্থ রয়েছে।

সাবধানতা এবং পূর্বসতর্কতা: যদি স্থিতিশীল তরল পদার্থ চোখ বা স্বকের সংস্পর্শে আসে তাহলে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। মুখের ভিতরে দেবেন না। [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) ওয়েবসাইটে MSDS দেখুন।











ছোট ক্যাপ দিয়ে স্বাস্রোধ হওয়ার বিপত্তি ঘোটেতে পারে।

সংরক্ষণ: 15°C / 30°C

### সারাংশ এবং কিটের ব্যাখ্যা:

Oragene-DNA একটি স্ব-সংগ্রহ কিট যা স্থিতিশীল লালার নমুনা সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশাবলী এবং উপকরণ প্রদান করে।

### লেবেল লেজেন্ড:

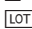
	প্যাকেজ সমীক্ষণ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করুন
	লালা সংগ্রহ (দ্বারা ব্যবহার)
	ডিটো ডায়গনস্টিক চিকিৎসা ডিভাইস
	ক্যাটালগ সংখ্যা
	CE মার্কিং
	সাবধান, ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন
	15°C / 30°C সংরক্ষণ নির্দেশাবলী
	অনুমোদিত প্রতিনিধি
	উৎপাদক
	লট সংখ্যা

### ব্যবহারকারীর নির্দেশাবলি


সংগ্রহ করার পূর্বে সমস্ত নির্দেশাবলী পড়ুন

### পদ্ধতি:


অধিকাংশ মানুষ 1 থেকে 5 পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে একটি লালা নমুনা সংগ্রহ করতে 2 থেকে 5 মিনিট সময় নিয়ে থাকেন।

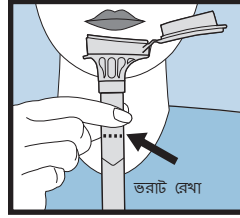


**1** ফানেল এর মধ্যে খুঁতু ফেলুন যাতে তরল লালা (বুদবুদ না) চিত্র #1 এ দেখানো ভরাট রেখা পর্যন্ত ভরে যায়

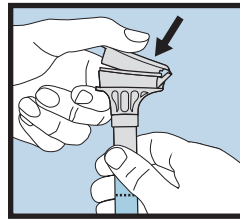


**2** এক হাত দিয়ে টিউবটি কে সোজা ধরে রাখুন। অন্য হাত দিয়ে ফানেল এর ঢাকনা বন্ধ করার জন্য জোর দিন (দেখানো হয়েছে) যতক্ষণ না আপনি বন্ধ করার আওয়াজ শুনতে পান। ঢাকনায় থাকা তরল পদার্থ টিউবের মধ্যে লালার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার জন্য নিঃসৃত হবে। নিশ্চিত করুন যে ঢাকনা ঠিক করে বন্ধ করা হয়েছে।

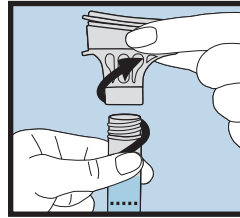

**3** টিউবটি কে সোজা করে ধরুন। ফানেল কে ঘুরিয়ে নিয়ে টিউব থেকে আলাদা করুন।

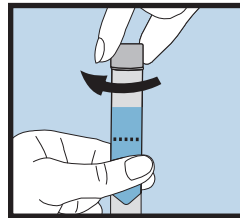

**4** ছোট ক্যাপ ব্যবহার করে টিউব কে ভাল ভাবে বন্ধ করে দিন।

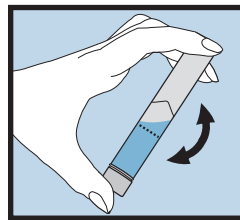

**5** ঢাকনা লাগানো অবস্থায় 5 সেকেন্ডের জন্য টিউবটি কে ঝাকান। ফানেল কে বাতিল করুন বা রিসাইকল করুন।