
সংগ্রহের পূর্বে সতর্কতা:

ফানেলের ঢাকনা থেকে প্লাস্টিকের ফিল্মটি সরিয়ে ফেলবেন না।

দাতার মুখের ভেতরে ঢোকানোর আগে প্রতিটি সময় স্পঞ্জ এর ক্ষতি হয়েছে কী না পরীক্ষা করুন। প্রথম স্পঞ্জে কোন ক্ষতি হলে অন্য স্পঞ্জ ব্যবহার করুন।

অন্যান্য স্পঞ্জ বা এক যান্ত্রিক বস্তু দ্বারা প্রতিকল্প করবেন না।

অভিপ্রেত ব্যবহার: লালা নমুনা থেকে মানুষের ডিএনএ সংগ্রহের জন্য।

বিষয়বস্তু: কিটে স্থিতিশীল তরল পদার্থ রয়েছে।

সাবধানতা এবং পূর্বসতর্কতা:

শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার বিপত্তি ঘোঁটে পারে নিম্নলিখিত দ্বারা:

- সংগ্রহ কিটে ছোট ক্যাপ।
- প্লাস্টিক ব্যাগে স্পঞ্জগুলি দ্বারা
- দাতার মুখের মধ্যে স্পঞ্জ ঢোকানোর সময় সতর্ক থাকা উচিত।

পরিদর্শিত সংগ্রহের জন্য:






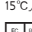





- দাতা কে একা ছেড়ে দেবেন না।
 - দাতা কে স্পঞ্জ, ছোট ক্যাপ বা প্যাকেজিং স্পর্শ করার অনুমতি দেবেন না।
 - যদি স্থিতিশীল তরল পদার্থ চোখ বা চামড়ার সংস্পর্শে আসে তাহলে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। মুখের ভিতরে দেবেন না।
- www.dnagenotek.com ওয়েবসাইটে MSDS দেখুন।

সংরক্ষণ: 15°C / 30°C

সারাংশ এবং কিটের ব্যাখ্যা:

Oragene-DNA একটি সংগ্রহে সহায়তা কিট যা স্থিতিশীল লালার নমুনা সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশাবলী ও উপকরণ প্রদান করে।

লেবেল লেজেন্ড:

	প্যাকেজ সন্নিবেশ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করুন
	লালা সংগ্রহ (দ্বারা ব্যবহার)
	ভিট্রো ডায়াগনস্টিক চিকিৎসা ডিভাইসে
	ক্যাটালগ সংখ্যা
	CE মার্কিং
	সাবধানতা, ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন
	সংরক্ষণ নির্দেশাবলী
	অনুমোদিত প্রতিনিধি
	উৎপাদক
	লট সংখ্যা
	ক্রমিক সংখ্যা

ব্যবহারকারীর নির্দেশাবলি


সংগ্রহ করার পূর্বে সমস্ত নির্দেশাবলী পড়ুন

পদ্ধতি:


নিশ্চিত করুন যে লালার নমুনা দেওয়ার 30 মিনিট আগে দাতা কিছু খায়না, পান করেনা, ধূমপান করেনা বা চুইং গম খায়না।

নিশ্চিত করুন যে নমুনা সংগ্রহ করার সময় একটি সোজা অবস্থানে থাকে।

1 থেকে 7 পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে একটি লালা নমুনা সংগ্রহ করতে 15 মিনিট সময় লাগতে পারে

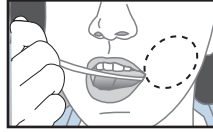


1 গালে একটি স্পঞ্জ স্থাপন করুন। 30 সেকেন্ডের জন্য মাড়ি ও ভেতরের গালের উপর আলতো করে সরান যাতে যতটা সম্ভব স্পঞ্জ লালা শুষে নিতে পারে।

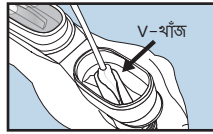


2 একবার স্পঞ্জ লালা দিয়ে ভিজে গেলে, স্পঞ্জ কে ফানেল এর V-খাঁজের মধ্যে সন্নিবেশ করুন। স্পঞ্জ কে ঘুরিয়ে ও মোচড়ে লালা কে V-খাঁজের ভেতরের প্রাচীরে নিগড়ে নিন। লালা টিউব মধ্যে প্রবাহিত হয়ে যাবে।




3 একই পদক্ষেপগুলি (1 ও 2) অনুসরণ করুন যতক্ষণ না খুঁ (বুদবুদ নয়) ভরাট রেখা পর্যন্ত পৌঁছায়। দাতার মুখের ভেতরে ঢোকানোর আগে প্রতিটি সময় স্পঞ্জ এর ক্ষতি হয়েছে কী না চেক পরীক্ষা করুন। প্রথম স্পঞ্জে কোন ক্ষতি হলে অন্য স্পঞ্জ ব্যবহার করুন।

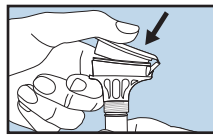


4 এক হাত দিয়ে টিউবটি কে সোজা করে ধরে রাখুন। অন্য হাত দিয়ে ফানেল এর ঢাকনা বন্ধ করার জন্য জোর দিন (দেখানো হয়েছে) যতক্ষণ না আপনি বন্ধ করার আওয়াজ শুনতে পান। ঢাকনায় থাকা তরল পদার্থ টিউবের মধ্যে লালার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার জন্য নিঃসৃত হবে। নিশ্চিত করুন যে ঢাকনা ঠিক করে বন্ধ করা হয়েছে।

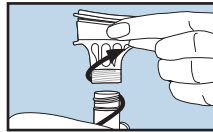

5 টিউবটি কে সোজা ধরুন। ফানেল কে ঘুরিয়ে টিউব থেকে আলাদা করুন।

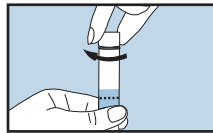

6 ছোট ক্যাপ ব্যবহার করে টিউবটি কে ভাল ভাবে বন্ধ করে দিন।

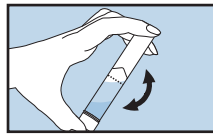

7 ঢাকনা লাগানো অবস্থায় 5 সেকেন্ডের জন্য টিউবটি কে ঝাকান। ফানেল এবং স্পঞ্জ কে বাতিল করুন।