



Резюме и обяснения за комплекта:

OMNIGENE-GUT предоставя необходимите материали и инструкции за вземане и стабилизиране на микробна ДНК от фекална проба.




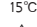

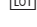
Предупреждения и предпазни мерки:

- САМО ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА.
- НЕ сваляйте оцветената в жълто горна част от епруветката.
- НЕ разливайте стабилизиращата течност, съдържаща се в епруветката.
- Изплакнете с вода, ако тази течност влезе в контакт с очите или кожата. НЕ поглъщайте.
- Ако вземате фекална проба в течно състояние, вижте предоставените отделно инструкции за потребителите.
- Дребните предмети могат да предизвикват опасност от задавяне.

Съхранение: 15°C до 25°C

Транспортирайте според приложимите законови разпоредби относно транспортирането на биологични спесимени. Вижте информационния лист за безопасност на адрес www.dnagenotek.com

Легенда на етикетите:

-  Вземете проба не по-късно от (използвайте не по-късно от)
-  Каталоген номер
-  Производител
-  15°C / 25°C Инструкции за съхранение
-  Внимание, проверете инструкциите за употреба
-  Партиден номер

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Прочетете всички инструкции преди да започнете вземането на пробата

Процедура:



- 1 ВАЖНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ МЕРКИ:**
- Изпразнете пикочния си мехур, преди да започнете вземане на проба.
 - Вземете фекална проба, която не съдържа урина или вода от тоалетната.
 - Може да имате нужда от тоалетна хартия или кърпички.



- 2** Хванете жълтата горна част на контейнера, развийте САМО лилавата капачка и я оставете настрана за по-нататъшна употреба.



ВАЖНО:
НЕ сваляйте оцветената в жълто горна част на епруветката.
НЕ разливайте стабилизиращата течност, съдържаща се в епруветката.

Не разсипвайте



- 3** Използвайте шпатулата, за да вземете малка част от фекалната проба.



Действителен размер на фекална проба.



- 4** Прехвърлете фекалната проба в жълтата горна част на контейнера. Повтаряйте, докато пробата запълни жълтата горна част на контейнера.




Запълнете

ВАЖНО: НЕ натискайте пробата в епруветката.



- 5** Подравнете частта на пробата, която стига до върха на епруветката и премахнете излишния материал. Ако е необходимо, избършете външната повърхност и върха на епруветката с тоалетна хартия или кърпичка.

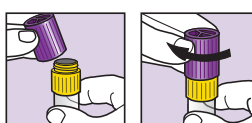


- 6** Вземете оцветената в лилаво капачка със затворения край надолу и я завинтете към оцветената в жълто горна част на епруветката докато не се затвори плътно.



Горна част на капачката



- 7** Разклатете запечатаната епруветка колкото може по-бързо и силно с движения напред-назад в продължение на поне 30 секунди.

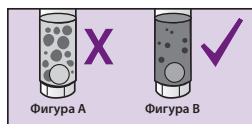

- 8** Фекалната проба ще се смеси със стабилизиращата течност в епруветката, не всички частици ще се разтворят. **ВАЖНО:** Продължете да разклатете ако останат големи по размер частици, както е показано на Фигура А.



- 9** Сложете шпатулата в оригиналната ѝ опаковка или я увийте в тоалетна хартия и я изхвърлете. **ВАЖНО:** Изпратете пробата за обработка съгласно инструкциите за доставка, предоставени отделно от доставчика на комплекта.