

### Összefoglaló és a készlet magyarázata:

Az OMNigene-GUT a mikrobiális DNS székletmintából való gyűjtéshez és stabilizáláshoz szükséges anyagokat és útmutatásokat tartalmazza.







### Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- CSAK KÜLSŐ HASZNÁLATRA.
- NE vegye le a csőről a sárga csőfedelelet.
- NE öntse ki a stabilizálófolyadékot a csőből.
- Ha folyadék kerül a szemébe vagy a bőrre, vízzel mossa ki. NE nyelje le.
- Folyós székletminta gyűjtése esetén lásd a külön mellékelt használati utasítást.
- A kis méretű tárgyak fulladásveszélyt okozhatnak.

**Tárolás:** 15 °C – 25 °C

Szállítás a biológiai minták szállítására vonatkozó előírások szerint. Az anyagbiztonsági adatlapot lásd a [www.dnagenetek.com](http://www.dnagenetek.com) honlapon.

### Jelmagyarázat:

-  A minta összegyűjtésének határideje (felhasználhatósági idő)
-  Katalógusszám
-  Gyártó
- 15°C / 25°C  Tárolási útmutatások
-  Vigyázat, olvassa el a használati utasítást
-  Tételszám

## FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÁSOK

### Gyűjtés előtt az összes utasítást olvassa el

#### Eljárás:



#### 1 FONTOS ELŐKÉSZÜLETEK:


- A gyűjtés megkezdése előtt ürítse ki a hólyagját.
- Gyűjtson vizelet- és WC-víz-mentes székletmintát.
- WC-papír vagy papírzsebkendő szükséges lehet.




#### 2 A sárga csőfedelelet tartva, CSAK a bíbor színű kupakot csavarja le, és tegye el későbbi használatra.

#### FONTOS:

NE vegye le a sárga csőfedelelet. NE öntse ki a csőben levő stabilizálófolyadékot.

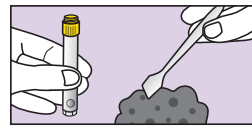


#### 3 A spatula segítségével gyűjtson kis mennyiségű székletmintát.

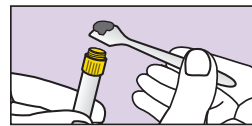

#### 4 Vigye át a székletmintát a sárga csőfedélbe. Ezt addig ismételje, amíg a minta megtölti a sárga csőfedelelet.

**FONTOS:** a mintát NE nyomja be a csőbe.

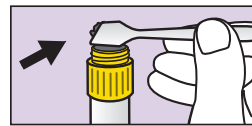


#### 5 Kaparja vízszintesen a cső teteje mentén, lesimítva a mintát, az esetleges többletet eltávolítva.


A cső külsejét és a fedelet szükség esetén WC-papírral vagy papírzsebkendővel törölje meg.



#### 6 A bíbor kupakot fogja meg a tömör végével feléle, és csavarja be a sárga csőbe, amíg szorosan nem zár.

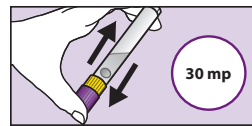


#### 7 A lezárt csövet legalább 30 másodpercig rázza előre-hátra olyan gyorsan és erősen, ahogy csak tudja.

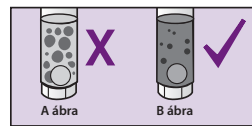

#### 8 A székletminta összekeveredik a csőben lévő stabilizálófolyadékkal, nem minden részecske fog feloldódni.

**FONTOS:** Ha **nagy** darabok maradnak fent, amint az az A ábrán látható, folytassa a rázást.

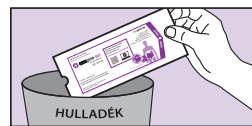

#### 9 A spatulát tegye vissza az eredeti csomagolásba, vagy tekerje be WC-papírba, és dobja ki a szemétkébe.

**FONTOS:** Küldje a mintát feldolgozásra a készletszállító által külön átadott szállítási utasítások alapján.