

Rezumat și explicarea setului:

OMNIGENE-GUT oferă materiale și instrucțiuni pentru recoltarea și stabilizarea ADN-ului dintr-o probă fecală.




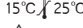


Avertizări și precauții:

- NUMAI PENTRU UZ EXTERN.
- NU scoateți partea superioară galbenă a eprubetei de pe eprubetă.
- NU vărsați lichidul de stabilizare din eprubetă.
- Spălați cu apă în caz de contact al lichidului cu ochii sau pielea. A NU se înghiți.
- Dacă recoltați o probă fecală lichidă, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate separat.
- Piesele mici pot prezenta un risc de sufocare.

Păstrare: 15°C și 25°

A se expedia în conformitate cu reglementările aplicabile referitoare la transportul speciilor biologice. Consultați Fișele de siguranță a materialelor (MSDS) pe www.dnagenotek.com

Legenda etichetei:

-  A se colecta proba până la (A se utiliza până la)
-  Număr de catalog
-  Fabricant
-  15°C / 25°C Instrucțiuni de păstrare
-  Atenție, consultați instrucțiunile de utilizare
-  Număr de lot

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATOR

Citiți toate instrucțiunile înainte de recoltare

Procedură:



- 1 PREGĂTIRI IMPORTANTE:**
- Goliți vezica înainte de a începe recoltarea.
 - Recoltați o probă de fecale fără urină sau apă din toaletă.
 - Este posibil să aveți nevoie de hârtie igienică sau șervețele.




- 2** În timp ce țineți partea superioară galbenă a eprubetei, deșurubați NUMAI capacul violet și puneți-l deoparte pentru utilizarea ulterioară.



IMPORTANT:

NU scoateți partea superioară galbenă a eprubetei. NU vărsați lichidul de stabilizare din eprubetă.

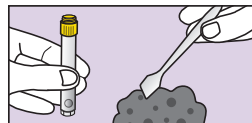

- 3** Utilizați spatula pentru a recolta o cantitate mică pentru proba fecală.



Mărimea efectivă a probei fecale.



- 4** Transferați proba de fecale în partea superioară galbenă a eprubetei. Repetați până când proba ajunge la partea superioară galbenă a eprubetei.




IMPORTANT: NU împingeți proba în eprubetă.



- 5** Răzuți orizontal pe partea superioară a eprubetei pentru a nivela proba și a elimina eventualul exces.


Ștergeți exteriorul și partea superioară a eprubetei cu hârtie igienică sau șervețele, după cum este necesar.

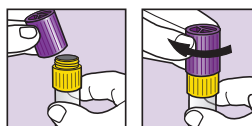

- 6** Ridicați capacul violet, cu capătul solid orientat în jos, și înșurubați-l pe partea superioară galbenă a eprubetei până la închiderea etanșă.



- 7** Agitați eprubeta etanșă cât mai puternic și mai rapid posibil, cu o mișcare înainte-înapoi, timp de minimum 30 de secunde.

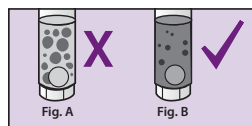

- 8** Proba fecală va fi amestecată cu lichidul de stabilizare din eprubetă; nu toate particulele se vor dizolva.

IMPORTANT: Continuați să agitați dacă rămân particule mari, după cum se ilustrează în Figura A.



- 9** Puneți spatula în ambalajul original sau împachetați-o în hârtie igienică și aruncați-o la gunoi.

IMPORTANT: Trimiteți proba pentru procesare, respectând instrucțiunile de livrare oferite separat de furnizorul trusei.