

Kitle ilgili açıklama ve özet bilgi:

OMNIGene-GUT, mikrobiyal DNA'nın dışkı örneğinden toplanmasına ve stabilize edilmesine ilişkin malzeme ve talimatlar sunar.






Uyarılar ve tedbirler:

- YALNIZCA HARİCİ KULLANIM İÇİNDİR.
- Tüpün üzerinde bulunan sarı tüp ucunu ÇIKARMAYIN.
- Stabilize edici sıvıyı tüpe dökmeyin.
- Stabilize edici sıvının göz veya ciltle temas etmesi halinde etkilenen bölgeyi suyla yıkayın. YUTMAYIN.
- Sıvı haldeki bir dışkı örneğini toplamak için ayrıca verilen kullanım talimatlarına başvurun.
- Küçük parçalar boğulma tehlikesi oluşturabilir.

Saklama: 15°C ila 25°C

Biyolojik örneklerin taşınmasıyla ilgili düzenlemelere uygun olarak gönderin. Bkz. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (www.dnagenotek.com).


Etiket açıklamaları:

-  Örneği son toplama tarihi (son kullanma tarihi)
-  Katalog numarası
-  Üretici
- 15°C / 25°C Saklama talimatları
-  Dikkat, kullanım talimatlarına bakınız
-  Lot numarası

KULLANIM TALIMATLARI

Kullanmadan önce tüm talimatları okuyun

Kullanım:

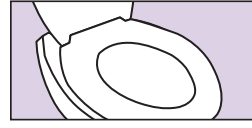

1 ÖNEMLİ HAZIRLIKLAR:


- Toplama işlemine başlamadan önce idrar torbanızı boşaltın.
- Toplamış olduğunuz dışkı örneğinin idrar veya tuvalet suyu içermediğinden emin olun.
- Tuvalet kağıdı veya mendil kullanabilirsiniz.




2 Sarı tüp ucunu tutarken, YALNIZCA mor kapağı çevirerek çıkarın ve daha sonra kullanmak üzere kenara ayırın.

ÖNEMLİ:

Sarı tüp ucunu ÇIKARMAYIN. Stabilize edici sıvıyı tüpe DÖKMEYİN.

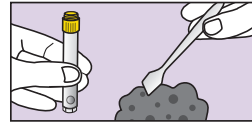


3 Küçük miktarda dışkı örneği toplamak için spatulayı kullanın.

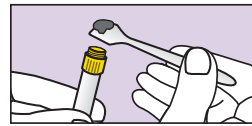

4 Dışkı örneğini sarı tüpün ucuna yerleştirin. Sarı tüp ucu örnekle dolana kadar bu işlemi tekrarlayın.

ÖNEMLİ: Örneği tüpün içine BASTIRMAYIN.

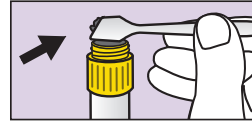

5 Örneği düzeltmek ve olası fazlalıkları gidermek için tüpün tepe kısmını yatay bir hareketle düzleştirin.


Tüpün dış ile üst kısmını gerektiğinde tuvalet kağıdı veya mendille temizleyin.



6 Düz yüzeyi aşağıya bakacak şekilde mor kapağı elinize alın ve sıkıca kapanacak şekilde sarı tüp ucunun üzerine tekrar çevirerek takın.



7 Sıkıca kapatılmış tüpü en az 30 saniye boyunca ileri-geri hareket ettirerek mümkün olduğunca sert bir şekilde çalkalayın.

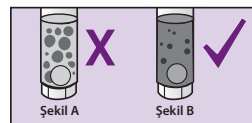

8 Dışkı örneği bu sayede tüpte bulunan stabilize edici sıvıyla karıştırılır; ancak, tüm partikülleri çözünmez.

ÖNEMLİ: Şekil A'da görüldüğü üzere büyük partiküller kalması halinde çalkalamaya devam edin.



9 Spatulayı birlikte verilen pakete yerleştirin veya bir tuvalet kağıdına sarıp çöpe atın.

ÖNEMLİ: İşlenebilmesi için toplamış olduğunuz örneği kit sağlayıcısının gönderim talimatlarına uygun şekilde gönderin.