

### Resumo e explicação do kit:

OMNigene-GUT fornece os materiais e instruções para a recolha e estabilização de ADN microbiano a partir de uma amostra fecal.







### Avisos e precauções:

- APENAS PARA UTILIZAÇÃO EXTERNA.
- NÃO remover a parte superior do tubo amarela do tubo.
- NÃO derramar o líquido estabilizador existente no tubo.
- Lavar com água se o líquido entrar em contacto com os olhos ou pele. NÃO ingerir.
- Se recolher uma amostra fecal líquida, consulte as instruções de utilização fornecidas em separado.
- Itens pequenos podem constituir perigo de asfixia.

**Armazenamento:** 15 °C a 25 °C

Expedir de acordo com os regulamentos aplicáveis relativos ao transporte de amostras biológicas. Consultar a Ficha de Dados sobre Segurança de Materiais em [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)


### Legenda do rótulo:

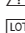-  Recolher amostra até (Data de validade)
-  Número de catálogo
-  Fabricante
-  15°C a 25°C Instruções de armazenamento
-  Cuidado, consultar as instruções de utilização
-  Número de lote

## INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

Leia as instruções na íntegra antes de realizar a recolha

### Procedimento:

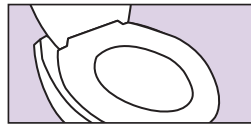


- 1 PREPARAÇÕES IMPORTANTES:**
- Esvazie a bexiga antes de iniciar a recolha.
  - Recolha a amostra fecal sem que esta tenha urina ou água da sanita.
  - Poderá ser necessário utilizar papel higiénico ou lenços de papel.



- 2** Segurando a parte superior amarela do tubo, desenrosque APENAS a tampa violeta do kit e reserve para utilização posterior.



**IMPORTANTE:** NÃO remover a parte superior amarela do tubo. NÃO derramar o líquido estabilizador existente no tubo.

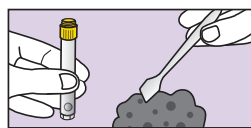

- 3** Utilize a espátula para recolher uma pequena quantidade de amostra fecal.



- 4** Transfira a amostra fecal para a parte superior amarela do tubo. Repita até que a amostra preencha toda a parte superior amarela do tubo.




**IMPORTANTE:** NÃO empurrar a amostra para o tubo.



- 5** Alise horizontalmente a parte superior do tubo para nivelar a amostra e remover qualquer excesso.


Limpe o exterior do tubo e da parte superior com papel higiénico ou lenços de papel, conforme necessário.

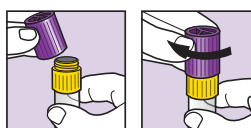

- 6** Pegue na tampa violeta com a parte final sólida voltada para baixo e enrosque na parte superior amarela do tubo até ficar firmemente fechada.



- 7** Agite o tubo fechado o mais rápida e veementemente possível com um movimento para a frente e para trás durante um mínimo de 30 segundos.

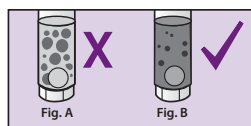

- 8** A amostra fecal irá ser misturada com o líquido estabilizador no tubo; nem todas as partículas se irão dissolver.

**IMPORTANTE:** Continue a agitar se continuarem a existir partículas **grandes** como ilustrado na Figura A.



- 9** Coloque a espátula na embalagem original ou embrulhe-a em papel higiénico e elimine.

**IMPORTANTE:** Envie a amostra para processamento seguindo as instruções de entrega fornecidas separadamente pelo fornecedor do kit.