

Acessório para vaso sanitário OM-AC1

Usado com  **OMNigene®-GUT**


INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Este acessório para vaso sanitário é usado com o kit OMNigene®-GUT para facilitar a coleta de amostras fecais.


Cuidado: NÃO permita que a água do vaso sanitário, urina, detergente ou fragrâncias entrem em contato com este acessório para vaso sanitário.

Armazenamento: 15°C a 25°C


Procedimento

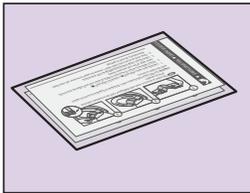

- 1** Dois acessórios para vaso sanitário são fornecidos no caso de você não conseguir coletar uma amostra na primeira tentativa.

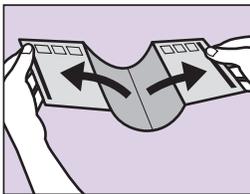


- 2** Cuidadosamente abra a borda com ▲; repita para a borda com ■.

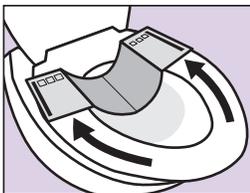

- 3** Prenda a superfície adesiva do acessório à parte de **TRÁS do assento do vaso sanitário** com o adesivo perto da borda externa do assento e pressione firmemente.



- 4** Colete a amostra fecal seguindo as instruções ao usuário do OMNigene®-GUT.

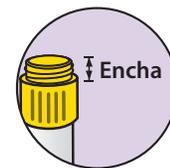

- 5** Coloque o acessório usado no vaso sanitário. Aguarde 1 minuto para que o papel amoleça e, em seguida, acione a descarga. Alternativamente, descarte no lixo.

DNA genotek



O OM-AC1 é feito na Holanda para a DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canadá K2V 1C2

Amostras superiores
Desempenho comprovado

Tel.: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*OMNigene é uma marca registrada da DNA Genotek Inc.

Alguns produtos da DNA Genotek podem não estar disponíveis em todas as regiões, entre em contato com seu representante de vendas para mais informações.

Todos os protocolos, white papers e notas de aplicação da DNA Genotek estão disponíveis na seção de suporte do nosso site, em www.dnagenotek.com.

Patente (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2018 DNA Genotek Inc., uma subsidiária da OraSure Technologies, Inc., todos os direitos reservados
PD-PR-00843 (BZ - Portuguese) Issue 1/2018-11

