

### Overzicht en uitleg van de kit:

OMNigene-GUT bevat de materialen en instructies voor het verzamelen en stabiliseren van microbiële DNA uit een stoelgangstaal.







### Waarschuwingen en voorzorgen:

- UITSLUITEND VOOR UITWENDIG GEBRUIK.
- Het gele dopje NIET van het buisje verwijderen.
- Zorg ervoor GEEN stabilisatievloeistof uit het buisje te morsen.
- Wanneer vloeistof in contact komt met de ogen of de huid, goed wassen met water. NIET inslikken.
- Raadpleeg de afzonderlijk meegeleverde gebruiksaanwijzing wanneer u een vloeibaar stoelgangstaal verzamelt.
- Kleine voorwerpen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

### Opslag: 15°C tot 25°C

Verzenden in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake het vervoer van biologische stalen. Raadpleeg MSDS op [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

### Legende label:

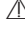-  Staal afnemen vóór (Te gebruiken vóór)
-  Catalogusnummer
-  Fabrikant
-  15°C - 25°C Opslaginstructies
-  Opgelet, raadpleeg gebruiksaanwijzing
-  Partijnummer

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Lees alle instructies vóór afname

#### Procedure:



#### 1 BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN:

- Ledig uw blaas vooraleer met de afname te beginnen.
- Verzamel het stoelgangstaal zonder urine of toiletwater.
- Toiletpapier of tissues kunnen nodig zijn.




- #### 2
- Terwijl u het buisje met de gele dop vasthoudt, schroeft u ALLEEN het paarse deksel van de kit en legt u het apart voor later gebruik.



#### BELANGRIJK:


Het gele dopje NIET van het buisje verwijderen. Zorg ervoor GEEN stabilisatievloeistof uit het buisje te morsen.

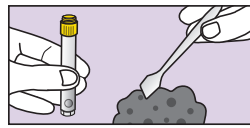

- #### 3
- Gebruik de spatel om een kleine hoeveelheid stoelgangstaal te verzamelen.



Reële grootte van het stoelgangstaal.

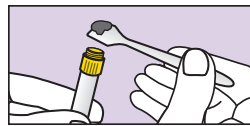

- #### 4
- Breng het stoelgangstaal over naar het buisje met de gele dop. Herhaal deze stap tot het staal het buisje met gele dop vult.




**BELANGRIJK:** het staal NIET in het buisje duwen.



- #### 5
- Zorg ervoor dat het staal mooi gelijk is met de bovenkant van het buisje en verwijder overtollig materiaal.


Veeg de buiten- en bovenkant van het buisje schoon met toiletpapier of tissue, indien nodig.

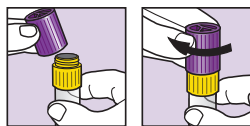

- #### 6
- Plaats de paarse kap met het solide uiteinde naar beneden op het buisje met gele dop en schroef hem stevig vast tot het buisje goed afgesloten is.



- #### 7
- Schud het afgesloten buisje zo hard en snel mogelijk heen en weer gedurende minimum 30 seconden.

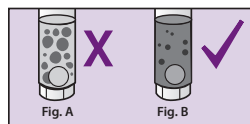

- #### 8
- Het stoelgangstaal wordt gemengd met de stabilisatievloeistof in het buisje, niet alle deeltjes zullen oplossen.

**BELANGRIJK:** Blijf schudden indien **grote** deeltjes overblijven zoals getoond in Figuur A.



- #### 9
- Plaats de spatel in de originele verpakking of wikkel hem in toiletpapier en gooi weg met het restafval.

**BELANGRIJK:** verzend het staal voor verwerking volgens de leveringsinstructies van de leverancier van de kit.