



Voorzorgsmaatregelen afname:

Zorg ervoor dat de punt met het sponsje vóór afname van een monster NIET in contact komt met oppervlakken.

De donor mag 30 minuten voorafgaand aan de afname van een monster NIET eten, drinken, roken of kauwgom kauwen.

Bedoeld gebruik: Voor de afname en stabilisatie van RNA uit monsters van menselijk speeksel.

Inhoud: Bevat 1 testkit.

Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen:

Gevaar voor verstikking. Wees voorzichtig bij het in de mond plaatsen van het sponsje.

Met water wassen als de vloeistof in contact komt met de ogen of de huid. NIET inslikken. Zie VIB op www.dnagenotek.com

Opslag: 15-25°C

Samenvatting en uitleg over de kit:

ORACollect®-RNA is een zelfafnamekit met de materialen en instructies voor het afnemen van een monster van menselijk speeksel.

Legenda etiket:

- Catalogusnummer
- CE-certificering
- In-vitro diagnostisch medisch hulpmiddel
- Fabrikant
- Geautoriseerd vertegenwoordiger
- 15°C-25°C Opslaginstructies
- Neem een monster vóór (gebruiken vóór)
- Partijnummer

	<p>Open de verpakking en verwijder de afnamekit zonder de punt van het sponsje aan te raken. Plaats het sponsje zo ver mogelijk achterin de mond en wrijf met een voor- en achterwaartse beweging over het onderste tandvlees (zie close-up afbeelding). Wrijf 10 keer voorzichtig over het tandvlees. Wrijf indien mogelijk niet over de tanden.</p>
	<p>Herhaal voorzichtig de wrijvende beweging aan de andere kant van de mond, over het onderste tandvlees, wederom 10 keer.</p>
	<p>Houd het buisje rechtop om morsen van de blauwe vloeistof in het buisje te voorkomen. Schroef de dop van het buisje zonder het sponsje aan te raken.</p>
	<p>Draai de dop ondersteboven en plaats het sponsje in het buisje en sluit dit stevig met de dop.</p>
	<p>Keer het afgesloten buisje om en schud het 15 keer stevig.</p>



Voor in-vitro diagnostisch gebruik



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands



*Superieure monsters
Bewezen prestaties*

DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tel.: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*ORACollect is een gedeponeerd handelsmerk van DNA Genotek Inc. Bepaalde producten van DNA Genotek zijn mogelijk niet verkrijgbaar in alle regio's. Neem voor informatie contact op met uw vertegenwoordiger. Alle protocollen, whitepapers en aanvragen van DNA Genotek zijn beschikbaar in het ondersteuningsdeel van onze website op www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2019 DNA Genotek Inc., een dochteronderneming van OraSure Technologies, Inc., alle rechten voorbehouden.
PD-PR-00885 (NL - Dutch) Issue 2/2019-10