



**Precauzioni per la raccolta:**

Assicurarsi che la punta della spugna NON entri in contatto con una superficie qualunque prima della raccolta.

Il donatore NON deve mangiare, bere, fumare o masticare gomma per i 30 minuti che precedono la raccolta del campione di saliva.

**Uso previsto:** per la raccolta e la stabilizzazione di RNA da campioni di saliva umana.

**Contenuto:** contiene 1 kit di raccolta.

**Avvertenze e precauzioni:**

Rischio di soffocamento. Occorre inserire la spugna in bocca con cautela.

Lavare con acqua se il liquido entra in contatto con gli occhi o la pelle. NON ingerire. Vedere la scheda dati sicurezza materiale su [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

**Conservazione:** 15-25°C

**Riepilogo e spiegazione del kit:**

ORACollect®-RNA è un kit di raccolta fai da te che fornisce i materiali e le istruzioni necessari per la raccolta di campioni di saliva umana.

**Legenda dell'etichetta:**

- Numero di catalogo
- Contrassegno CE
- Dispositivo medico per diagnosi in vitro
- Produttore
- Rappresentante autorizzato
- 15°C-25°C Istruzioni per la conservazione
- Raccogliere il campione entro (Utilizzare entro)
- Numero di lotto

	<p>Aprire l'imballo e rimuovere il raccoglitore senza toccare la punta della spugna. Posizionare la spugna più indietro possibile in bocca purché non crei disagio e sfregare lungo le gengive inferiori (vedere immagine ravvicinata) con un movimento avanti e indietro. Sfregare delicatamente le gengive 10 volte. Se possibile evitare di sfregare i denti.</p>
	<p>Ripetere delicatamente il movimento di sfregamento dal lato opposto della bocca lungo le gengive inferiori per altre 10 volte.</p>
	<p>Tenere il tubetto in verticale per impedire che il liquido all'interno del tubetto si versi. Svitare il cappuccio dal tubetto di raccolta senza toccare la spugna.</p>
	<p>Capovolgere il cappuccio, inserire la spugna nel tubetto e chiudere bene il cappuccio.</p>
	<p>Capovolgere il tubetto con il cappuccio inserito e scuoterlo vigorosamente 15 volte.</p>



Esclusivamente per diagnosi in vitro



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands



*Campioni superiori  
Efficacia testata*

DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tel: +1.613.723.5757  
Fax: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

\*ORACollect è un marchio registrato di DNA Genotek Inc.

Alcuni prodotti DNA Genotek possono non essere disponibili in tutte le aree geografiche, si prega di contattare il vostro rappresentante alle vendite per avere ulteriori dettagli.

Tutti i protocolli, white paper e note applicative DNA Genotek sono disponibili nella sezione di supporto del nostro sito web [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Brevetto ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2019 DNA Genotek Inc., una filiale di OraSure Technologies, Inc., tutti i diritti riservati.  
PD-PR-00887 (IT - Italian) Issue 2/2019-10