
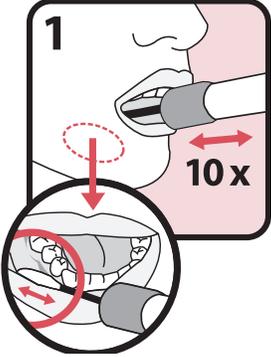
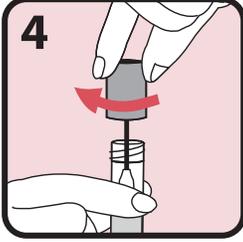


العربية  
تعليمات جمع العينات:

|  |   |
|--|---|
| <p>افتح العبوة وأخرج أداة الجمع دون لمس طرف الإسفنجية. ضع الإسفنجية داخل الفم بأقصى عمق لا يسبب الانزعاج ومررها على اللثة السفلية (انظر الصورة المقربة) ذهابًا وإيابًا. مررها على اللثة بلطف 10 مرات. إن أمكن، تجنب تمريرها على الأسنان.</p> |    |
| <p>كرر حركة التمرير بلطف على اللثة السفلية في الجهة المقابلة من الفم 10 مرات إضافية.</p>   |    |
| <p>أمسك الأنبوب في وضع قائم لأعلى لمنع سكب السائل الموجود داخله. انزع الغطاء من أنبوب الجمع دون لمس الإسفنجية.</p>   |   |
| <p>اقلب الغطاء على الوجه الآخر، وأدخل الإسفنجية في الأنبوب ثم أغلق الغطاء بإحكام.</p>  |  |
| <p>اقلب الأنبوب المغطى وهزه بقوة 15 مرة.</p>   |  |

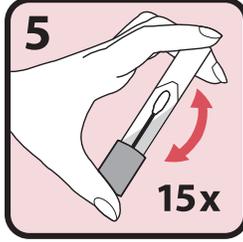

احتياطات جمع العينة:

احرص على ألا يتلامس طرف الإسفنجية مع أي سطح قبل جمع العينة.

ينبغي ألا يأكل المتبرع أو يشرب أو يدخن أو يمضغ اللبان لمدة 30 دقيقة قبل جمع عينة اللعاب.

الغرض من الاستخدام: لجمع الحمض النووي الريبوزي وتثبيتته من عينات اللعاب البشري.

المحتويات: يحتوي على مجموعة جمع عينات واحدة.

تحذيرات واحتياطات: يوجد خطر الاختناق. ينبغي توخي الحذر عند إدخال الإسفنجية في الفم.

إذا تلامس السائل مع العينين أو الجلد فاغسلهما بالماء. لا تتبلع الإسفنجية. انظر صحيفة بيانات سلامة المادة من خلال الموقع الإلكتروني [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

التخزين: 25 ± 15 درجة مئوية

ملخص وتفسير مجموعة الأدوات:

إن ORACollect® RNA هي مجموعة جمع عينات ذاتية توفر المواد والتعليمات الخاصة بجمع عينات اللعاب البشري.

دليل الملتصق:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| رقم الكتالوج                     | REF         |
| علامة الامتثال الأوروبية (CE)    | CE          |
| جهاز طبي مخصص للتشخيص في المختبر | MD          |
| جهة التصنيع                      | MD          |
| الممثل القانوني                  | MD          |
| تعليمات التخزين                  | 15°C / 25°C |
| تاريخ انتهاء الصلاحية            | MD          |
| رقم الدفعة                       | LOT         |

EC REP Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

ORACollect® هي علامة تجارية مسجلة تابعة لشركة DNA Genotek Inc. بعض منتجات DNA Genotek قد لا تكون متاحة في جميع المناطق الجغرافية، تواصل مع مندوب المبيعات الذي تتبع له للحصول على مزيد من التفاصيل. تُتاح كافة البروتوكولات والتقارير الإدارية والملاحظات التطبيقية الخاصة بـ DNA Genotek في قسم الدعم الخاص بموقعنا الإلكتروني على الرابط [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

براءة الاختراع (www.dnagenotek.com/legalnotices) © 2019 DNA Genotek Inc. جزء من شركة OraSure Technologies, Inc. جميع الحقوق محفوظة. PD-PR-00889 (AR - Arabic) Issue 2/2019-10

عينات فائقة الدقة  
أداء مثبت الجودة

DNA genotek

الهاتف: +1.613.723.5757  
الفاكس: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2