

دستورالعمل‌های کاربر

پیش از نمونه‌برداری، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید


رویه:

مطمئن شوید اهداکننده به مدت 30 دقیقه قبل از نمونه‌برداری بزاق، از خوردن غذا، نوشیدن مایعات، مصرف دخانیات یا جویدن آدامس خودداری کند.

مطمئن شوید اهداکننده در طول نمونه‌برداری در حالت قائم قرار داشته باشد.

انجام مراحل 1 تا 7 برای نمونه‌برداری بزاق می‌تواند حداکثر 15 دقیقه طول بکشد.


1 یک اسفنج را در زیر گونه قرار دهید. برای اینکه تا جایی که ممکن است بزاق زیادی جذب شود، به آرامی اسفنج را به مدت 30 ثانیه در امتداد لثه‌ها و قسمت داخلی گونه‌ها حرکت دهید.

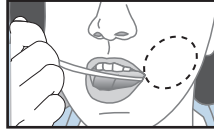

2 پس از اینکه اسفنج پر از بزاق شد، آن را در شکاف V شکل قیف قرار دهید. با چرخاندن و فشار دادن اسفنج روی دیواره داخلی شکاف V شکل، بزاق را از آن خارج کنید. بزاق درون لوله قرار خواهد گرفت.




3 این مراحل (1 تا 2) را با استفاده از همان اسفنج تکرار کنید تا بزاق مایع (نه حباب‌ها) به خط نشانگر برسد. هر بار قبل از قرار دادن اسفنج در دهان اهداکننده، آن را بررسی کنید و از سلامت آن مطمئن شوید. اگر علائم ساییدگی یا پارگی در اسفنج وجود داشت، از اسفنج دیگری استفاده کنید. برای کاهش تعداد حباب‌ها، با قسمت پایین لوله، روی سطح محکمی ضربه بزنید.

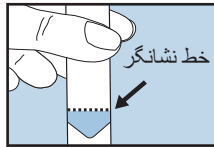


4 لوله را به‌صورت عمودی با یک دست نگهدارید. با دست دیگر (طبق تصویر) درپوش را محکم فشار دهید، تا پس از ایجاد صدای تق بلند، بسته شود. مایع درون درپوش وارد لوله می‌شود تا با بزاق ترکیب شود. مطمئن شوید درپوش کاملاً بسته است.




5 لوله را به‌صورت عمودی نگهدارید. قیف را بیچانید تا از لوله جدا شود.

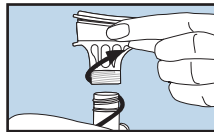

6 از درپوش کوچک برای بستن محکم لوله استفاده کنید.

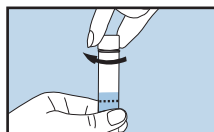

7 لوله دارای درپوش را به مدت 5 ثانیه تکان دهید. قیف و اسفنج‌ها را دور بیندازید.

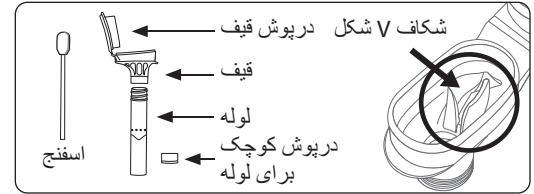

اقدامات احتیاطی نمونه‌برداری:

به هیچ عنوان لایه پلاستیکی را از درپوش قیف جدا نکنید.

هر بار قبل از قرار دادن اسفنج در دهان اهداکننده، آن را بررسی کنید و از سلامت آن مطمئن شوید. اگر علائم ساییدگی یا پارگی در اسفنج وجود داشت، از اسفنج دیگری استفاده کنید.

به هیچ عنوان از اسفنج‌ها یا سواب‌های دیگر به عنوان جایگزین استفاده نکنید.

موارد استفاده: برای نمونه‌برداری DNA انسان همراه با کمک از نمونه بزاق دهان.

محتویات: کیت حاوی مایع پایدارکننده است.

هشدارها و اقدامات احتیاطی:

خطرات خفگی:

- درپوش کوچک در کیت نمونه‌برداری.
- کیسه پلاستیکی حاوی اسفنج.
- در هنگام وارد کردن اسفنج به داخل دهان اهداکننده، باید احتیاط کرد.

جهت نمونه‌برداری تحت نظارت:

- همواره اهداکننده را تحت نظر داشته باشید.
- به هیچ عنوان به اهداکننده اجازه ندهید به اسفنج، درپوش کوچک یا بسته‌بندی دست بزنند.
- در صورت تماس مایع پایدارکننده با چشم‌ها یا پوست، محل تماس را با آب بشویید. از قورت دادن آن پرهیز کنید. MSDS را در www.dnagenotek.com مشاهده کنید

نگهداری: 15°C تا 30°C

خلاصه و توضیحات کیت:

ORAgene-DNA کیت نمونه‌برداری کمکی است که مطالب و دستورالعمل‌های نمونه‌برداری و پایدار کردن نمونه بزاق را ارائه می‌دهد.

راهنمای پرچسب:

به بروشور بسته‌بندی مراجعه شود	☐
نمونه‌برداری بزاق (استفاده تا)	☐
ابزار پزشکی تشخیصی برون‌تنی	☐
شماره کاتالوگ	REF
نشان CE	CE
احتیاط، به دستورالعمل‌های استفاده مراجعه شود	⚠
دستورالعمل‌های نگهداری 15°C تا 30°C	☐
نماینده مجاز	☐
تولیدکننده	☐
شماره لات	LOT