
Prekawzjonijiet tal-ġbir:

Żgura li l-ponta tal-isponza MA TIĠIX f'kuntatt ma' kwalunkwe wiċċ qabel il-ġbir.

Id-donatur M'GHANDUX jiekol, jixrob, ipejpep jew jomgħod iċ-chewing gum għal 30 minuta qabel jingabar kampjun orali.

Użu Maħsub: Dan il-prodott huwa ddisinjat għall-ġbir u l-istabilizzazzjoni ta' DNA minn kampjuni orali.

Kontenut: Fih kitt tal-ġbir 1












Twissijiet u prekawzjonijiet: Periklu ta' fgar. Għandha tiġi pprattikata kawzjoni meta tiddaħħal l-isponza fil-ħalq.

Jekk il-likwidu stabilizzanti jiġi f'kuntatt mal-għajnejn jew il-ġilda, aħsel bl-ilma. TIBLAX. Ara MSDS fuq www.dnagenotek.com

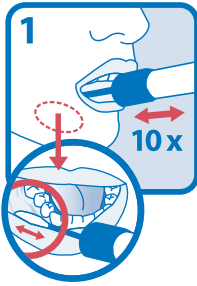
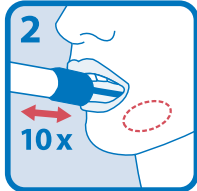

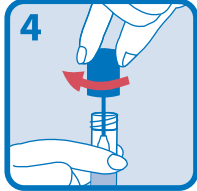
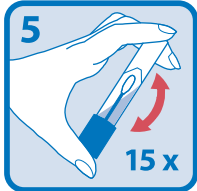
Hażna: 15°C-25°C

Taqsisra u spjegazzjoni tal-kitt: ORACollect-DNA huwa kitt ta' awto-ġabra li jipprovdi l-materjali u l-sitruzzjonijiet għall-ġbir ta' kampjuni orali umani.

Spjega tat-tikketta:

	Numru tal-katalogu
	Apparat mediku dijanjostiku In vitro
	Markatura CE
	Markatura UKA
	Manifattur
	Apparat mediku
	Terġax tuża mill-ġdid
	Ikkonsulta l-istruzzjonijiet għall-użu
	Uża sa
	Numru tal-lott
	Rappreżentant Awtorizzat

MALTI
Istruzzjonijiet għall-ġbir ta' kampjun:

	Iftaħ il-pakkett u oħroġ il-kollettur mingħajr ma tmiss il-ponta tal-isponza. Daħħal l-isponza kemm jista' jkun lura fil-ħalq sakemm ikun komdu u oġhrok mal-ħanek ta' isfel (ara l-immagni mill-qrib) f'moviment 'il quddiem u lura. Orgħok il-ħanek bilmod għal 10 darbiet. Jekk possibbli, evita li toghrok is-sniien.
	Irrepeti l-moviment ta' għorik fuq in-naħa opposta tal-ħalq mal-ħanek t'isfel għal 10 darbiet oħra.
	Żomm it-tubu wieqaf dritt sabiex tevita li l-likwidu ta' stabilizzazzjoni joħroġ minn ġot-tubu. HOLL it-tapp il-blu minn mat-tubu tal-ġbir mingħajr ma tmiss l-isponza.
	Aqleb it-tapp rasu 'l isfel, daħħal l-isponza fit-tubu u għalqa t-tapp sewwa.
	Aqleb it-tubu bit-tapp u ċaqalqu malajr minn naħa għall-oħra malajr għal 15-il darba.