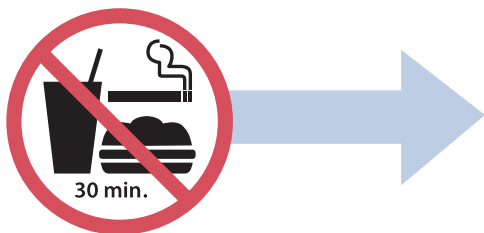


Pentru diagnostic in vitro


Precauții privind colectarea:

Asigurați-vă că vârful buretelui NU intră în contact cu nicio suprafață înainte de colectare.

Donatorul NU trebuie să mănânce, să bea, să fumeze sau să mestече gumă timp de 30 de minute înainte de a se colecta proba orală.

Utilizare prevăzută: Acest produs este conceput pentru colectarea și stabilizarea ADN-ului din probe orale umane.

Conținut: Conține 1 kit de colectare












Avertismente și precauții: Pericol de sufocare. Trebuie să aveți grijă atunci când introduceți buretele în gură.

Spălați cu apă dacă lichidul stabilizator sau proba intră în contact cu ochii sau pielea. NU înghițiți. Consultați fișa tehnică de securitate la www.dnagenotek.com

Depozitare: 15°C-25°C

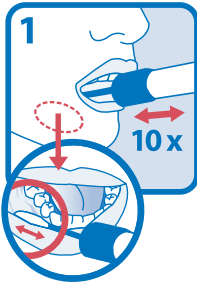
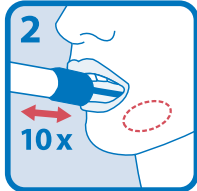

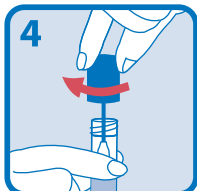
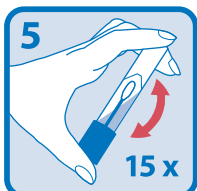
Rezumat și detalii despre set: ORACollect-DNA este un kit de autocolectare care oferă materialele și instrucțiunile pentru colectarea probelor orale umane.

Legendă etichetă:

	Număr catalog
	Dispozitiv medical de diagnostic in vitro
	Marcaj CE
	Marcaj UKCA
	Producător
	Dispozitiv medical
	Nu refolosiiți
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Data expirării
	Număr lot
	Reprezentant autorizat

ROMÂNĂ

Instrucțiuni pentru colectarea probelor:

	Deschideți pachetul și scoateți colectorul fără a atinge vârful buretelui. Așezați buretele cât mai în spatele cavității bucale, în limitele confortului, și frecați de-a lungul gingiilor inferioare (a se vedea imaginea de aproape), înapoi și înainte. Frecați ușor gingiile de 10 ori. Dacă este posibil, evitați frecarea dinților.
	Repetați ușor mișcarea de frecare pe partea opusă a gurii, de-a lungul gingiilor inferioare, încă de 10 ori.
	Țineți tubul în poziție verticală pentru a preveni scurgerea lichidului stabilizator din interiorul tubului. Deșurubați capacul albastru din tubul de colectare fără a atinge buretele.
	Întoarceți capacul cu capul în jos, introduceți buretele în tub și închideți strâns capacul.
	Răsturnați tubul cu capac și agitați energic de 15 ori.