

**Toplama önlemleri:**

**Toplama işleminden önce sünger ucun herhangi bir yüzeye temas ETMEDİĞİNDEN emin olun.**

**Donör, ağızdan örnek toplama işlemi öncesindeki 30 dakika boyunca bir şey yiyip içmemeli, sigara kullanmamalı veya sakız çiğnememelidir.**

**Kullanım amacı:** Bu ürün, insanların ağızından alınan örneklerden DNA toplamak ve bunları stabilize etmek için tasarlanmıştır.

**İçindekiler:** 1 adet toplama kiti içerir

**Uyarılar ve önlemler:** Boğulma tehlikesi. Süngeri ağıza sokarken dikkatli olunmalıdır.

Stabilize edici sıvının gözlerinizle veya cildinizle temas etmesi halinde su ile yıkayın. YUTMAYIN. [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) adresinden MSDS sayfasına bakın.

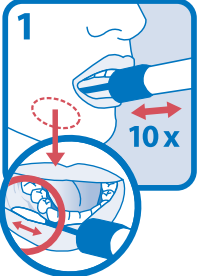
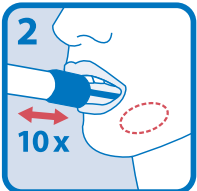

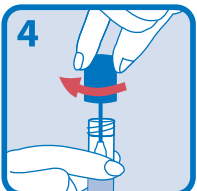
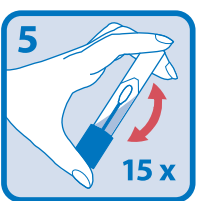
**Saklama:** 15 °C-25 °C (59 °F-77 °F)

**Kit özeti ve açıklaması:** ORACollect-DNA, insanların ağızından örnek toplamaya yönelik malzeme ve talimatlar içeren kişinin kendi kendine kullanabileceği bir toplama kitidir.

**Etiket açıklaması:**

REF	Katalog numarası
IVD	In vitro tanılama tıbbi cihazı
CE	CE işareti
UK CA	UKCA işareti
MD	Üretici
MD	Tıbbi cihaz
⊗	Tekrar kullanılmayın
i	Kullanım kılavuzuna bakın
📅	Son kullanım tarihi
LOT	Parti numarası
EC REP	Yetkili Temsilci

**TÜRKÇE****Örnek toplama talimatları:**

	Ambalajı açın ve sünger ucuna dokunmadan toplayıcıyı çıkarın. Süngeri, ağızınızın rahat hissedebildiğiniz en gerisine yerleştirin ve ileri geri hareketlerle alttaki diş etlerine sürün (yakın plan resme bakın). Diş etlerine hafifçe 10 kez sürün. Mümkün olduğunca dişlere sürtmekten kaçının.
	Sürtme hareketini ağız diğer tarafında alt diş etleri boyunca 10 kez daha hafifçe tekrarlayın.
	Tüpteki stabilize edici sıvının dökülmesini önlemek için tüpü dik tutun. Süngere dokunmadan toplama tüpündeki mavi kapağı çıkarın.
	Kapağı ters çevirin, süngeri tüpe yerleştirin ve kapağı sıkıca kapatın.
	Kapağı kapatılmış tüpü ters çevirin ve 15 kez kuvvetli bir şekilde sallayın.