

Résumé et explication du kit :

OMNigene-GUT fournit l'équipement et les instructions permettant de prélever et stabiliser de l'ADN microbien à partir d'un échantillon de matières fécales.

Avertissements et précautions :

- POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT.
- NE PAS enlever l'extrémité jaune du tube.
- NE PAS laisser s'échapper le liquide stabilisateur du tube.
- En cas de contact du liquide avec la peau ou les yeux, bien rincer avec de l'eau. NE PAS ingérer.
- Si un échantillon fécal liquide est utilisé, voir la notice fournie séparément.
- Les petits objets peuvent présenter un risque d'étouffement.

Entreposage : 15 à 25 °C

Expédier conformément à la réglementation en vigueur pour le transport de spécimens biologiques. Voir la fiche de données de sécurité sur le site www.dnagenotek.com

Légende de l'étiquette :

- Prélever l'échantillon avant (Utiliser avant)
- Numéro de catalogue
- Fabricant
- 15°C à 25°C Consignes d'entreposage
- Attention – Lire les instructions d'utilisation
- Numéro de lot

NOTICE D'UTILISATION

Lire la notice avant le prélèvement

Procédure :



1 PRÉPARATIONS IMPORTANTES :

- Se vider la vessie avant le prélèvement.
- L'échantillon de matières fécales prélevé doit être exempt d'urine ou d'eau provenant de la cuvette.
- Utiliser du papier toilette ou des mouchoirs en papier si nécessaire.




2 En tenant l'extrémité jaune du tube, dévisser SEULEMENT le bouchon VIOLET du kit et le mettre de côté pour plus tard.



IMPORTANT :

- NE PAS enlever l'extrémité jaune du tube.
- NE PAS laisser s'échapper le liquide stabilisateur du tube.

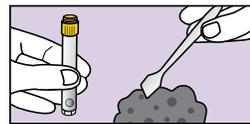

3 Utiliser la spatule pour prélever une petite quantité de matières fécales.



4 Déposer l'échantillon dans la partie supérieure jaune du tube. Répéter jusqu'à ce que l'échantillon remplisse la portion jaune du tube.



- IMPORTANT : NE PAS pousser l'échantillon vers l'intérieur du tube.



5 Nivelier horizontalement l'ouverture du tube afin d'aplanir l'échantillon et d'enlever toute matière excédentaire.


- Essuyer l'extérieur et l'extrémité du tube à l'aide de papier toilette ou d'un mouchoir en papier si nécessaire.



6 Placer le bouchon violet face pleine vers le bas et le visser sur l'extrémité jaune du tube jusqu'à ce qu'il soit bien serré.



7 Agiter le tube scellé aussi fortement et rapidement que possible par un mouvement de va-et-vient pendant un minimum de 30 secondes.

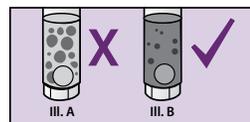

8 L'échantillon de matières fécales se mélangera au liquide stabilisateur ; certaines particules ne se dissoudront pas.

- IMPORTANT : Continuer d'agiter si les particules de grosse taille demeurent insolubles, comme dans l'illustration A.



9 Placer la spatule dans son emballage d'origine ou l'envelopper de papier toilette et le jeter à la poubelle.

- IMPORTANT : Envoyer l'échantillon pour traitement selon les instructions d'envoi fournies par le prestataire du kit.