


## INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Lea todas las instrucciones antes de la recolección

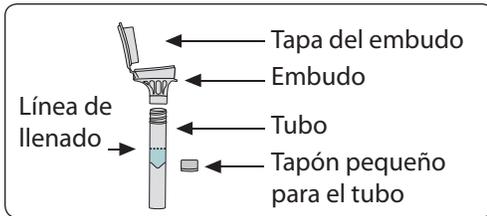

### Precauciones para la recolección:

**NO ingiera alimentos ni bebidas, no fume ni mastique goma de mascar 30 minutos antes de obtener su muestra de saliva.**

**NO quite la película plástica de la tapa del embudo.**

**Uso previsto:** Para la recolección de ADN humano de muestras de saliva.

**Contenido:** El kit contiene líquido estabilizador.

**Advertencias y precauciones:** Enjuague con agua si el líquido estabilizador entra en contacto con los ojos o la piel. No lo ingiera. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) en [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Tapón pequeño, peligro de asfixia.

**Almacenamiento:** 15°C / 30°C

### Resumen y explicación del kit:


ORAgene-Dx es un kit de autorrecolección que contiene los materiales y las instrucciones para recolectar y estabilizar muestras de saliva.

### Leyenda de la etiqueta:


	Consulte el prospecto del paquete
	Recoja la saliva antes del (fecha de caducidad)
	Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
	Número de catálogo
	Marca CE
	Precaución: consulte las instrucciones de uso
	Instrucciones de almacenamiento
	Representante autorizado
	Fabricante
	Número de lote

### Procedimiento:


**A la mayoría de las personas les lleva entre 2 y 5 minutos proporcionar una muestra de saliva siguiendo los pasos 1 a 5.**

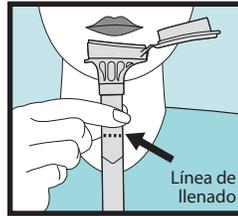


- 1 Escupa hasta que la cantidad de saliva líquida (no de burbujas) alcance la línea de llenado que se muestra en la figura n.º 1.

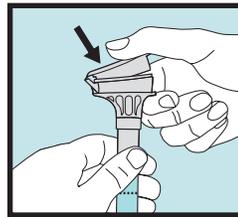


- 2 Sostenga el tubo en posición vertical con una mano. Cierre la tapa con la otra mano (como se muestra), empujándola con firmeza hasta que escuche un chasquido fuerte. El líquido de la tapa pasará al tubo para mezclarse con la saliva. Asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada.

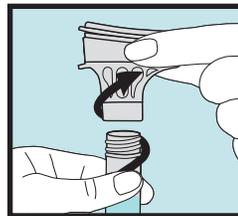

- 3 Sostenga el tubo en posición vertical. Desenrosque el embudo del tubo.

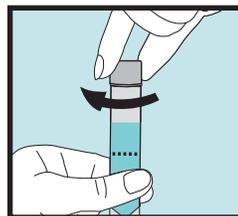

- 4 Utilice el tapón pequeño para cerrar el tubo herméticamente.

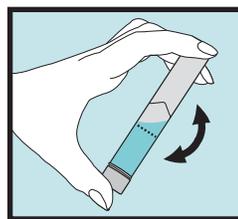

- 5 Agite el tubo tapado durante 5 segundos. Deseche o recicle el embudo.