

ملحق المرحاض OM-AC1


يُستخدم مع OMNigene®GUT

تعليمات المستخدم


يُستخدم ملحق المرحاض هذا مع مجموعة OMNigene®GUT لتسهيل تجميع عينات البراز.
تحذير: لا تسمح بتلامس مياه المرحاض أو البول أو منظّف أو معطر مع ملحق المرحاض هذا.
التخزين: من 15 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية

الإجراء:


1 يتم توفير ملحقين للمرحاض في حالة عدم مقدرتك على جمع عينة واحدة عند المحاولة الأولى.

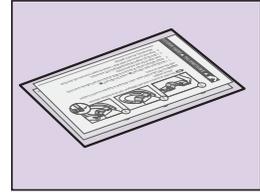

2 قم برفع القاعدة المفتوحة باستخدام ▲؛ كرر المحاولة مع القاعدة باستخدام ■.

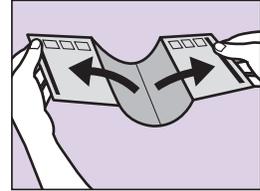

3 قم ب تثبيت السطح اللاصق للملحق في الجزء الخلفي من مقعد المرحاض مع تقريب السطح اللاصق إلى القاعدة الخارجية من المقعد واضغط بشدة.

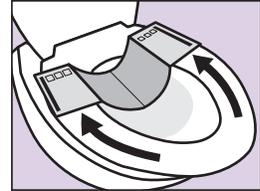

4 اجمع عينة البراز باتباع تعليمات المستخدم الخاصة بـ OMNigene®GUT.



5 ألقِ الملحق المستخدم في المرحاض. انتظر دقيقة حتى يصبح الورق رطبًا ومبللًا. أو بدلًا من ذلك، تخلّص منه في النفايات.

