


Precauții privind colectarea:

Donatorul NU trebuie să mănânce, să bea, să fumeze sau să mestecă gumă timp de 30 de minute înainte de a se colecta proba de salivă.

Asigurați-vă că vârful buretelui NU intră în contact cu nicio suprafață înainte de colectare.

Utilizare intenționată: ORACollect®-Dx este destinat utilizării în colectarea neinvazivă a probelor de salivă. ADN-ul uman din proba de salivă este izolat, stabilizat și adecvat pentru utilizare în aplicații de diagnosticare moleculară autorizate de FDA. Probele de salivă colectate folosind ORACollect-Dx sunt stabilizate și pot fi transportate și/sau depozitate pe termen lung în condiții ambientale.

Conținut: Kit-ul conține lichid stabilizator.

Avertismente și precauții:

- Numai pe bază de rețetă. Pentru uz profesional.
- Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de colectarea probelor; nerespectarea lor poate avea ca rezultat o probă inadecvată, iar randamentul ADN-ului poate fi afectat.
- Pericol de sufocare. Trebuie să aveți grijă atunci când introduceți buretele în gură.
- Este posibil ca donatorii cu xerostomie (gură uscată) să nu poată colecta adecvat proba pe baza acestor instrucțiuni, rezultând un randament mai scăzut al ADN-ului și o probă inutilizabilă.
- Spălați cu apă dacă lichidul stabilizator sau proba intră în contact cu ochii sau pielea. NU înghițiți. Consultați fișa tehnică de securitate la www.dnagenotek.com

Depozitare: 15°C-25°C

Legendă etichetă:

	Număr catalog
	Dispozitiv medical de diagnostic in vitro
	Marcaj CE
	Marcaj UKCA
	Producător
	Dispozitiv medical
	Nu refolosiți
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Colectați proba până la (Data expirării)
	Număr lot
	Reprezentant autorizat

	<p>Deschideți pachetul și scoateți colectorul fără a atinge vârful buretelui. Așezați buretele cât mai în spatele cavității bucale, în limitele confortului, și frecați de-a lungul gingiilor inferioare (a se vedea imaginea de aproape), înapoi și înainte. Frecați ușor gingiile de 10 ori. Dacă este posibil, evitați frecarea dinților.</p>
	<p>Repețiți ușor mișcarea de frecare pe partea opusă a gurii, de-a lungul gingiilor inferioare, încă de 10 ori.</p>
	<p>Țineți tubul în poziție verticală pentru a preveni scurgerea lichidului stabilizator din interiorul tubului. Deșurubați capacul albastru din tubul de colectare fără a atinge buretele.</p>
	<p>Întoarceți capacul cu capul în jos, introduceți buretele în tub și închideți strâns capacul.</p>
	<p>Răsturnați tubul cu capac și agitați energic de 10 ori.</p>