


Προφυλάξεις συλλογής:

Ο δωρητής ΔΕΝ πρέπει να φάει, να πει, να καπνίσει ή να μασήσει τσιγάρα για 30 λεπτά πριν από τη συλλογή του δείγματος σιέλου.

Βεβαιωθείτε ότι το σπογγώδες άκρο ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια πριν από τη συλλογή.

Προοριζόμενη χρήση: Το ORACollect[®]Dx προορίζεται για χρήση στη μη επεμβατική συλλογή δειγμάτων σιέλου. Το ανθρώπινο DNA από δείγμα σιέλου απομονώνεται, σταθεροποιείται και είναι κατάλληλο για χρήση σε μοριακές διαγνωστικές εφαρμογές που έχουν λάβει άδεια από τον FDA. Τα δείγματα σιέλου που συλλέγονται με τη χρήση του ORACollect-Dx σταθεροποιούνται και μπορούν να μεταφερθούν ή/και να αποθηκευτούν μακροπρόθεσμα σε συνθήκες περιβάλλοντος.

Περιεχόμενα: Το κιτ περιέχει σταθεροποιητικό υγρό.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:

- Μόνο με ιατρική συνταγή. Για επαγγελματική χρήση.
- Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη συλλογή του δείγματος. Τυχόν παρέκκλιση από αυτές μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκές δείγμα και να επηρεάσει την απόδοση του DNA.
- Κίνδυνος πνιγμού. Απαιτείται προσοχή κατά την εισαγωγή του σπόγγου στη στοματική κοιλότητα.
- Οι δωρητές με ξηροστομία ενδέχεται να μην συλλέξουν επαρκές δείγμα με χρήση αυτών των οδηγιών το οποίο θα επιφέρει χαμηλότερη απόδοση DNA και μη έγκυρο δείγμα για χρήση.
- Πλύνετε με νερό εάν το υγρό σταθεροποίησης έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. ΜΗΝ καταπίνετε. Βλ. Δελτίο δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS) στη διεύθυνση www.dnagenotek.com


Αποθήκευση: 15°C-25°C

Υπόμνημα ετικέτας:


REF	Αριθμός καταλόγου
IVD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν in vitro διαγνωστικής χρήσης
CE	Σήμανση CE
UK CA	Σήμανση UKCA
MD	Κατασκευαστής
MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
⊗	Μην επαναχρησιμοποιείτε
i	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
📅	Συλλογή δείγματος έως (Ημερομηνία λήξης)
LOT	Αριθμός παρτίδας
EC REF	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

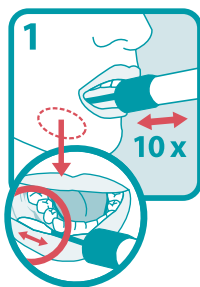


Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε τον συλλέκτη χωρίς να ακουμπήσετε το σπογγώδες άκρο. Τοποθετήστε τον σπόγγο στη στοματική κοιλότητα όσο πιο βαθιά γίνεται χωρίς να προκαλεί δυσφορία και τρίψτε κατά μήκος των κάτω ούλων (βλ. κοντινό εικόνας) με κινήσεις μπρος-πίσω. Τρίψτε απαλά τα ούλα 10 φορές. Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε το τρίψιμο των δοντιών.

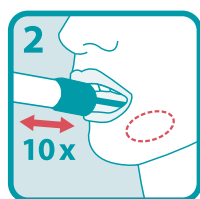


Επαναλάβετε το τρίψιμο με απαλές κινήσεις προς την αντίθετη πλευρά του στόματος κατά μήκος των κάτω ούλων για 10 φορές ακόμα.

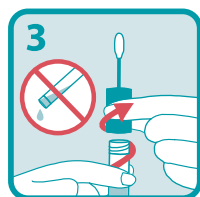

Κρατήστε το σωληνάριο σε όρθια θέση για να μην βγει το σταθεροποιητικό υγρό από το σωληνάριο. Ξεβιδώστε το μπλε πώμα από το σωληνάριο συλλογής χωρίς να ακουμπήσετε τον σπόγγο.

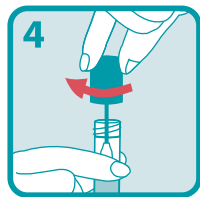

Γυρίστε το πώμα ανάποδα, εισαγάγετε τον σπόγγο στο σωληνάριο και κλείστε σφιχτά το πώμα.

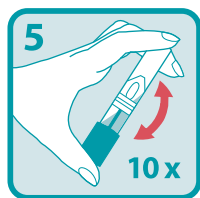

Αναστρέψτε το σωληνάριο με το πώμα και ανακινήστε έντονα 10 φορές.