



Instruções de montagem do kit de envio

As instruções a seguir foram elaboradas para ajudá-lo a montar e usar o kit de envio para coleta de amostras usando produtos da DNA Genotek pelo correio. Esses kits foram criados para seguir os regulamentos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) especificamente para exemplares provenientes de doadores com uma probabilidade mínima de presença de elementos patogênicos.

Conteúdo do kit de envio

A DNA Genotek oferece os itens a seguir a granel.

Para amostras humanas

- Envelopes e etiquetas: N° do catálogo MO-A
 - Envelope grande para envio
 - Envelope pequeno para retorno com bolhas de plástico internas com a inscrição “EXEMPT HUMAN SPECIMEN” [EXEMPLAR HUMANO DISPENSADO]
 - Etiquetas de endereçamento em branco (2 por solução a enviar)
 - Instruções de endereçamento para doadores (1 por solução a enviar)
- Bolsa para exemplar de material biológico: N° do catálogo MO-3 (genérico) ou MO-4 (específico para os tubos da série 500)
 - Bolsa de plástico para transporte à prova de líquido, inclusive material absorvente com logotipo impresso indicando risco patogênico e material absorvente inserido

Para amostras animais

- Envelopes e etiquetas: N° do catálogo MO-B
 - Envelope grande para envio
 - Envelope pequeno para retorno com bolhas de plástico internas com a inscrição “EXEMPT ANIMAL SPECIMEN” [EXEMPLAR ANIMAL DISPENSADO]
 - Etiquetas de endereçamento em branco (2 por solução a enviar)
 - Instruções de endereçamento para doadores (1 por solução a enviar)
- Bolsa para exemplar de material biológico: N° do catálogo MO-3
 - Bolsa de plástico para transporte impermeável incluindo material absorvente

A ser fornecida pelo pesquisador

- Porte para os envelopes para envio e para retorno
- Quaisquer outros formulários de usuários para doadores que o pesquisador deseje incluir
- Kit de autocoleta DNA Genotek (adquirido separadamente)

Instruções de montagem

1. Imprima uma etiqueta de endereço de ENVIO que inclua o endereço do doador.
2. Imprima uma etiqueta de endereço de RETORNO que inclua o endereço ao qual a amostra deve ser devolvida.

Observação: Podemos lhe fornecer um modelo do Word caso deseje fazer essas etiquetas de maneira eletrônica.

