

**Προφυλάξεις για τη συλλογή:**

**MHN** τρώτε, πίνετε, καπνίζετε ή μασάτε τσίκλα για 30 λεπτά πριν τη χορήγηση του δείγματος του σάλιου σας.

**MHN** αφαιρείτε το πλαστικό φιλμ από το πώμα.

**Ενδεικνυόμενη χρήση:** Για τη συλλογή ανθρώπινου DNA από δείγματα σάλιου.

**Περιεχόμενα:** Το κιτ περιέχει σταθεροποιητικό υγρό.

**Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:**




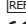

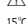



Ξεπλύνετε με νερό εάν το σταθεροποιητικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. Μην καταπίνετε. Ανατρέξτε στο ΦΔΑΥ, στη διεύθυνση [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

**Αποθήκευση:** 15°C  $\pm$  30°C

**Σύνοψη και επεξήγηση του κιτ:**


Το Oragene-DNA είναι ένα κιτ ατομικής συλλογής που παρέχει τα απαραίτητα υλικά και οδηγίες για τη συλλογή και σταθεροποίηση δειγμάτων σάλιου.

**Επεξήγηση ετικέτας:**

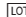	Ανατρέξτε στο ένθετο της συσκευασίας
	Συλλέξτε το σάλιο έως (Ημ/νία λήξης)
	Ιατρική συσκευή διαγνωστικής χρήσης in vitro
	Αριθμός καταλόγου
	Ένδειξη CE
	Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
15°C $\pm$ 30°C	Οδηγίες αποθήκευσης
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
	Κατασκευαστής
	Αριθμός παρτίδας

**Διαδικασία:**


Για τους περισσότερους ανθρώπους απαιτούνται περίπου 2 έως 5 λεπτά για τη χορήγηση ενός δείγματος σάλιου ακολουθώντας τα βήματα 1 έως 4.

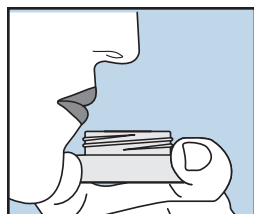


**1** Ξεκινήστε να δίνετε το δείγμα σας σάλιου.



**2** Συνεχίστε να πτύετε, μέχρι η ποσότητα υγρού σάλιου (όχι φυσαλίδες) να φτάσει μέχρι τη στάθμη που φαίνεται στην εικόνα αρ. 2.

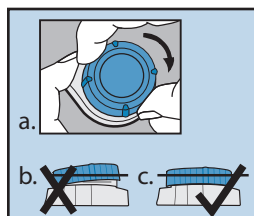

**3** Τοποθετήστε το δοχείο σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βιδώστε το πώμα στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι το πώμα είναι καλά κλεισμένο, όπως φαίνεται στην εικόνα αρ. 3c. Αν δυσκολεύεστε να κλείσετε το πώμα εντελώς, στρέψτε το πώμα λίγο αριστερόστροφα και ξαναπροσπαθήστε.

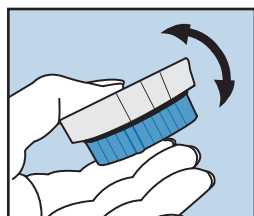

**4** Ανακινήστε ελαφρά για 10 δευτερόλεπτα. Ανακυκλώστε την εξωτερική συσκευασία.