
Mjere opreza pri prikupljanju:

Pazite da vrh spužve NE dotakne bilo koju površinu prije prikupljanja.

Davatelj NE SMIJE jesti, piti, pušiti ili žvakati žvakaću gumu 30 minuta prije uzimanja uzorka.

Namjena: Ovaj je proizvod dizajniran za prikupljanje i stabilizaciju DNK iz ljudskih oralnih uzoraka.

Sadržaj: Sadrži 1 komplet za prikupljanje












Upozorenje i mjere opreza: opasnost od gušenja. Potreban je oprez pri umetanju spužve u usta.

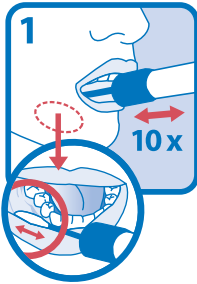
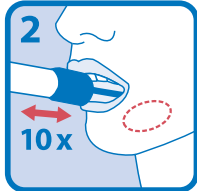

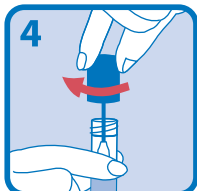
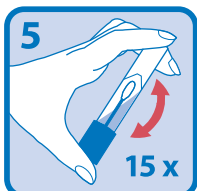
Ispirite vodom ako tekućina za stabilizaciju dođe u doticaj s očima ili kožom. NEMOJTE progutati. Pogledajte MSDS na www.dnagenotek.com

Čuvanje: 15°C-25°C

Sažetak i objašnjenje kompleta: ORACollect-DNA je komplet za samoprikupljanje koji sadrži materijale i upute za prikupljanje ljudskih oralnih uzoraka.

Legenda etiketa:

	Kataloški broj
	Dijagnostički medicinski uređaj In vitro
	CE oznaka
	UKCA oznaka
	Proizvođač
	Medicinski uređaj
	Nemojte ponovno koristiti
	Pogledajte upute za uporabu
	Koristite do
	Broj serije
	Ovlašteni predstavnik

	Otvorite paket i izvadite sakupljač ne dodirujući vrh spužve. Spužvu smjestite što je moguće više unatrag u usta i trljajte po donjim desnim (pogledajte sliku izbliza) naprijed-natrag. Nježno istrljajte desni 10 puta. Po mogućnosti izbjegavajte trljanje zuba.
	Nježno ponovite pokrete trljanja na suprotnoj strani usta duž donjih desni dodatnih 10 puta.
	Držite epruvetu uspravno kako biste spriječili prolijevanje sadržaja iz epruvete. Odrnite plavi poklopac s epruvete za prikupljanje ne dodirujući spužvu.
	Okrenite poklopac naopako, umetnite spužvu u epruvetu i čvrsto zatvorite poklopac.
	Preokrenite zatvorenu epruvetu i snažno protresite 15 puta.