
**Försiktighet vid insamling:**

Var noga med att svabbspetsen **INTE** kommer i kontakt med något innan insamling.

Provgivaren bör **INTE** äta, dricka, röka eller tugga tuggummi 30 minuter innan insamling av ett oralt prov.

**Avsedd användning:** Denna produkt är utvecklad för insamling och stabilisering av DNA från mänskliga orala prover.

**Innehåll:** Innehåller 1 insamlingskit










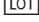

**Varningar och försiktighet:** Kvävningrisk. Försiktighet bör iaktas när svabben förs in i munnen.

Tvätta med vatten om stabiliseringsvätska kommer i kontakt med ögon eller hud. Intag **INTE**. Säkerhetsdatablad finns på [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

**Förvaring:** 15 °C-25 °C

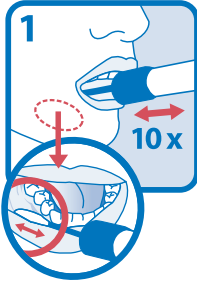
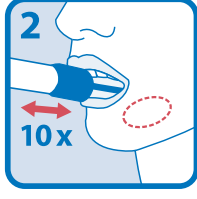

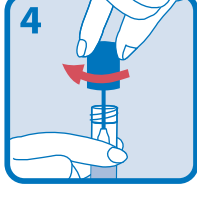
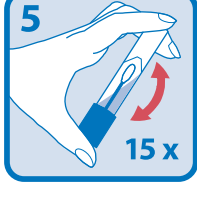
**Sammanfattning och förklaring av kitet:** ORACollect-DNA är ett självinsamlingskit som innehåller material och instruktioner för insamling av mänskliga orala prover.

**Etiketter:**

	Katalognummer
	Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik
	CE-märkning
	UKCA-märkning
	Tillverkare
	Medicinteknisk produkt
	Endast engångsbruk
	Läs anvisningarna innan användning
	Sista förbrukningsdag
	Batchnummer
	Auktoriserad representant

## SVENSKA

**Anvisningar för provinsamling:**

	<p>Öppna förpackningen och ta ut svabben utan att vidröra svabbspetsen. För in svabben så långt bak i sidan av munnen som möjligt och gnugga mot det nedre tandkötet (se närbild) fram och tillbaka. Gnugga försiktigt mot tandkötet 10 gånger. Undvik helst att gnugga mot tänderna.</p>
	<p>Upprepa gnuggningen försiktigt på motsatt sida av munnen längs det nedre tandkötet ytterligare 10 gånger.</p>
	<p>Håll röret upprätt för att undvika att stabiliseringsvätskan i röret spills ut. Skruva av det blå locket från provröret utan att vidröra svabben.</p>
	<p>Vänd locket upp och ned, för in svabben i röret och skruva åt locket ordentligt.</p>
	<p>Vänd det stängda röret upp och ned och skaka ordentligt 15 gånger.</p>