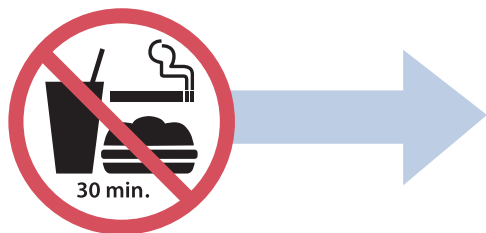


Esclusivamente per diagnosi in vitro


Precauzioni per la raccolta:

Assicurarsi che la punta della spugna NON entri in contatto con alcuna superficie prima della raccolta.

Il donatore NON deve mangiare, bere, fumare o masticare gomma per i 30 minuti che precedono la raccolta del campione orale.

Uso previsto: questo prodotto è studiato per la raccolta e la stabilizzazione di DNA da campioni orali umani.

Contenuto: contiene 1 kit di raccolta












Avvertenze e precauzioni: rischio di soffocamento. Occorre inserire la spugna in bocca con cautela.

Lavare con acqua se il liquido stabilizzante venisse a contatto con gli occhi o con la pelle. NON ingerire. Vedere la scheda dati sicurezza materiale su www.dnagenotek.com

Conservazione: tra 15°C e 25°C

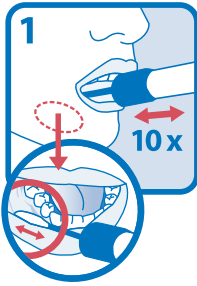
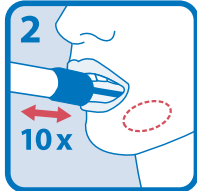

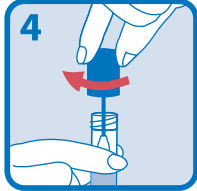
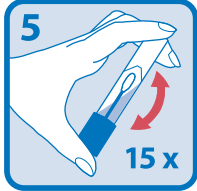
Riepilogo e spiegazione del kit: ORACollect-DNA è un kit di raccolta fai da te che fornisce i materiali e le istruzioni necessari per la raccolta di campioni orali umani.

Legenda dell'etichetta:

	Numero di catalogo
	Dispositivo medico diagnostico per diagnosi in vitro
	Contrassegno CE
	Contrassegno UKCA
	Produttore
	Dispositivo medico
	Non riutilizzare
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Usare entro
	Numero di lotto
	Rappresentante autorizzato

ITALIANO

Istruzioni per la raccolta dei campioni:

	Aprire la confezione e rimuovere il raccogliitore senza toccare la punta della spugna. Posizionare la spugna più indietro possibile in bocca purché non crei disagio e sfregare lungo le gengive inferiori (vedere immagine ravvicinata) con un movimento avanti e indietro. Sfregare delicatamente le gengive 10 volte. Se possibile evitare di sfregare i denti.
	Ripetere delicatamente il movimento di sfregamento dal lato opposto della bocca lungo le gengive inferiori per altre 10 volte.
	Tenere la provetta in verticale per impedire che il liquido stabilizzante all'interno della provetta si versi. Svitare il cappuccio blu dalla provetta di raccolta senza toccare la spugna.
	Capovolgere il cappuccio, inserire la spugna nella provetta e chiudere bene il cappuccio.
	Capovolgere la provetta con il cappuccio inserito e scuoterla vigorosamente 15 volte.