

Για in vitro διαγνωστική χρήση


**Προφυλάξεις συλλογής:**

**Βεβαιωθείτε ότι το σπογγώδες άκρο ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια πριν από τη συλλογή.**

**Ο δωρητής ΔΕΝ πρέπει να φάει, να πει, να καπνίσει ή να μασήσει τσιγάρα για 30 λεπτά πριν από τη συλλογή του δείγματος από στόματος.**

**Προοριζόμενη χρήση:** Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για τη συλλογή και τη σταθεροποίηση του DNA από ανθρώπινα δείγματα από στόματος.

**Περιεχόμενα:** Περιέχει 1 κιτ συλλογής












**Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:** Κίνδυνος πνιγμού. Απαιτείται προσοχή κατά την εισαγωγή του σπόγγου στη στοματική κοιλότητα.

Πλύνετε με νερό εάν το σταθεροποιητικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. ΜΗΝ καταπίνετε. Βλ. Δελτίο δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS) στη διεύθυνση [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

**Αποθήκευση:** 15°C-25°C

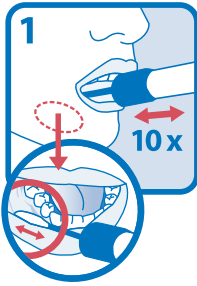
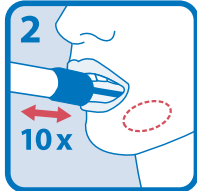

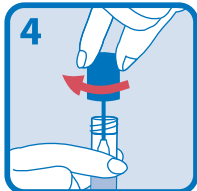
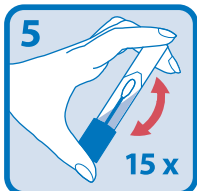
**Σύνοψη και επεξήγηση του κιτ:** Το ORACollect-DNA είναι ένα κιτ ατομικής συλλογής το οποίο παρέχει υλικά και οδηγίες για τη συλλογή ανθρώπινων δειγμάτων από του στόματος.

**Υπόμνημα ετικέτας:**

	Αριθμός καταλόγου
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν in vitro διαγνωστικής χρήσης
	Σήμανση CE
	Σήμανση UKCA
	Κατασκευαστής
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Μην επαναχρησιμοποιείτε
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Ημερομηνία λήξης
	Αριθμός παρτίδας
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

**Οδηγίες συλλογής δείγματος:**

	Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε τον συλλέκτη χωρίς να ακουμπήσετε το σπογγώδες άκρο. Τοποθετήστε τον σπόγγο στη στοματική κοιλότητα όσο πιο βαθιά γίνεται χωρίς να προκαλεί δυσφορία και τρίψτε κατά μήκος των κάτω ούλων (βλ. κοντινό εικόνας) με κινήσεις μπρος-πίσω. Τρίψτε απαλά τα ούλα 10 φορές. Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε το τρίψιμο των δοντιών.
	Επαναλάβετε το τρίψιμο με απαλές κινήσεις προς την αντίθετη πλευρά του στόματος κατά μήκος των κάτω ούλων για 10 φορές ακόμα.
	Κρατήστε το σωληνάριο σε όρθια θέση για να μην βγει το σταθεροποιητικό υγρό από το σωληνάριο. Ξεβιδώστε το μπλε πώμα από το σωληνάριο συλλογής χωρίς να ακουμπήσετε τον σπόγγο.
	Γυρίστε το πώμα ανάποδα, εισαγάγετε τον σπόγγο στο σωληνάριο και κλείστε σφιχτά το πώμα.
	Αναστρέψτε το σωληνάριο με το πώμα και ανακινήστε έντονα 15 φορές.