



**채취 주의사항:**

채취 전에 스펀지 팁이 다른 표면에 닿지 않도록 하십시오.

공여자는 구강 샘플을 채취하기 전 30분 동안은 음식과 물을 섭취하지 않고 흡연을 하거나 껌을 씹지 않아야 합니다.

**사용 용도:** 본 제품은 인간 구강 샘플로부터 DNA를 채취 및 안정화하기 위해 설계되었습니다.

**내용물:** 채취 키트 1개 동봉

**경고 및 사용상 주의사항:** 질식 위험. 스펀지를 입에 넣을 때 주의해야 합니다.

안정액이 눈이나 피부에 닿은 경우 물로 씻어냅니다. 섭취하지 마십시오. [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)에서 MSDS를 참조하십시오

**보관:** 15°C~25°C

**키트 요약 및 설명:** ORACollect•DNA는 인간 구강 샘플을 채취하는 물질과 지침을 제공하는 자가 채취 키트입니다.

**라벨 기호 표시:**

- 카탈로그 번호
- 생체 외 진단용 의료기기
- CE 마크
- UKCA 마크
- 제조사
- 의료기기
- 재사용 금지
- 사용 지침 참조
- 사용 기간
- 로트 번호
- 승인된 담당자

**한글 샘플 채취 지침:**

	<p>스펀지 팁에 손이 닿지 않도록 주의하며 패키지를 열어 수집기를 꺼냅니다. 스펀지를 불편감이 느껴지지 않을 정도로 가능한 한 깊이 입 뒤쪽으로 넣고 아래쪽 잇몸을 따라 (상세 이미지 참조) 스펀지를 앞뒤로 움직여 문지릅니다. 부드럽게 잇몸을 10회 문지릅니다. 가능하면 치아에 닿지 않게 주의하십시오.</p>
	<p>반대쪽 아래 잇몸을 따라 다시 부드럽게 10회 문질러 반복합니다.</p>
	<p>튜브를 잡고 똑바로 세워 튜브에 담긴 안정액이 쏟아지지 않게 합니다. 스펀지에 손이 닿지 않도록 주의하며 채취 튜브의 파란색 뚜껑을 분리합니다.</p>
	<p>뚜껑을 뒤집어 스펀지를 튜브에 넣은 후 뚜껑을 단단히 돌려 닫아줍니다.</p>
	<p>뚜껑을 닫은 튜브를 뒤집고 15회가량 세게 흔듭니다.</p>